


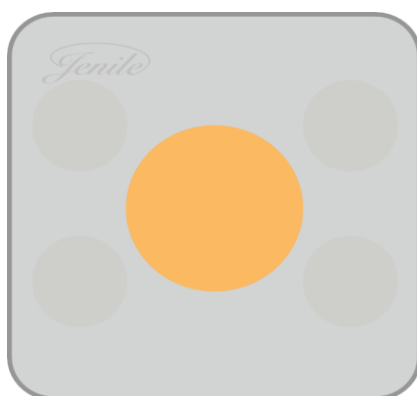

Fikseeritud seade pistikusse FP16

Kasutusjuhend

**Spetsiaalselt väljatöötatud kurtidele ja
kuulmispuudega inimestele**







**Kõik meie tooted on
omavahel ühendatud.**

Sisukord

Fikseeritud vilkurseade pistikusse FP16	4
---	---

Fikseeritud vilkurseade pistikusse FP16

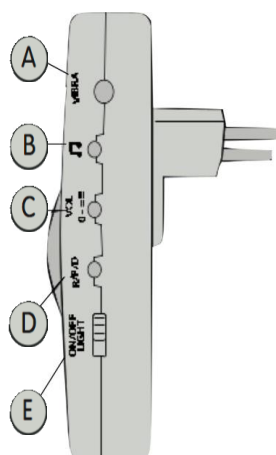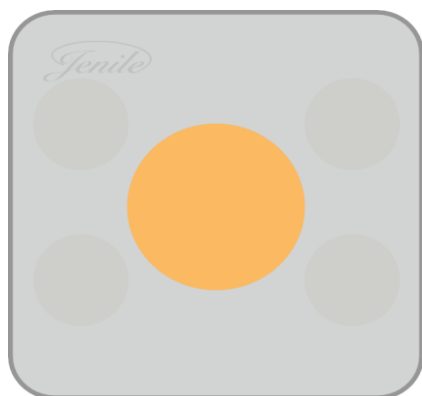

- A Vibreeriva padja ühenduspesa (valikuline)
- B Helina toon
- C Helina tugevus
- D Ühenduse pistik
- E Valguse sisse/välja (on/off) lüliti

Tehnilised andmed

Juhtmevaba seade

Kaal: 140g

Kaugus: 200 meetrit maksimaalselt vabas ruumis

Ühendatavate toodete arv: maksimaalselt 20seadet.

Toiteallikas: Võrguühendus

Ooterežiim: <4.5 mA

Töörežiim: <800 mA

Raadio sagedus: 433Mhz

Dekodeerimise vorming: MCU

Mõõtmed: 9.5 x 9.5 x 2 cm

Garantii: 2 aastat


Funktsioon:

Vilkurseadme abil edastatakse Teile kodust turvasignaale ja teised märguanded.




Hoiatus: Vilkurseadme töötamise jaoks peavad Jenile saatjad olema samal raadiosagedusel.


Vilkurseade töötab pistiku kaudu ja seda ei ole vaja laadida.

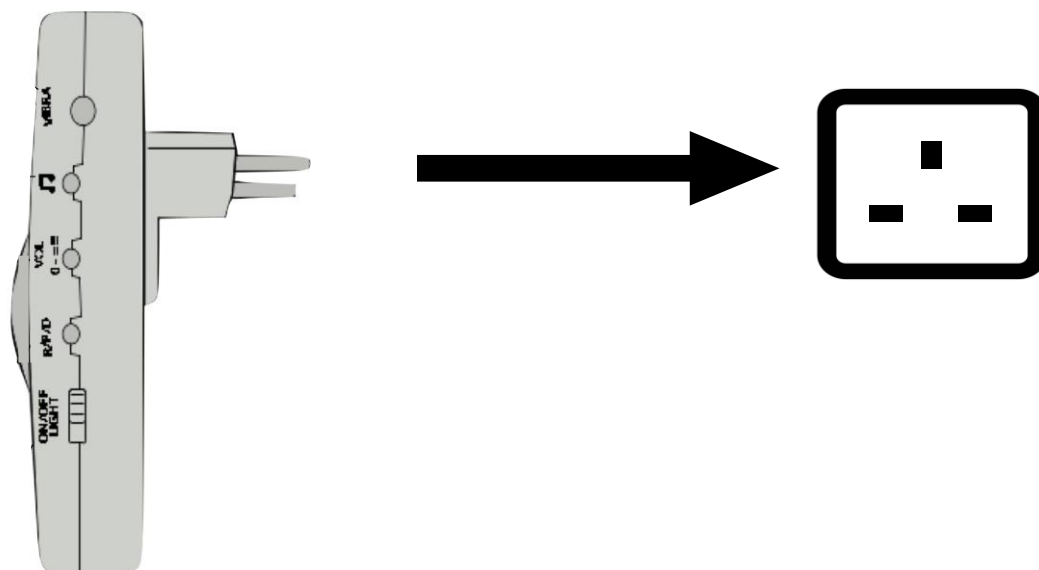


Lihtsalt lülitage seade sisse vajutades nuppu(E).

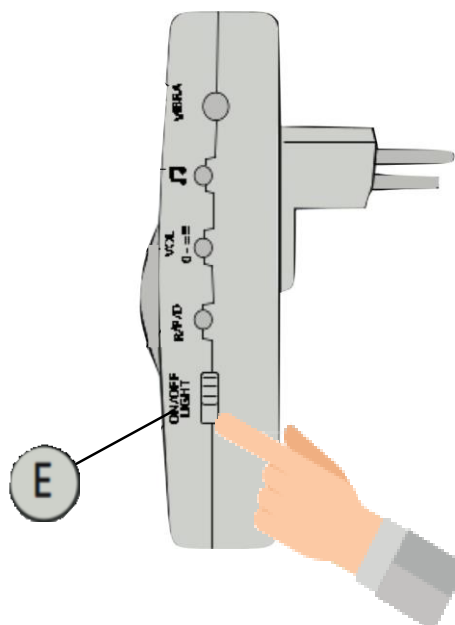

Lisaks vilkumisele on võimalik valida seadmest muusikat. Vajutage korduvalt nuppu (B).

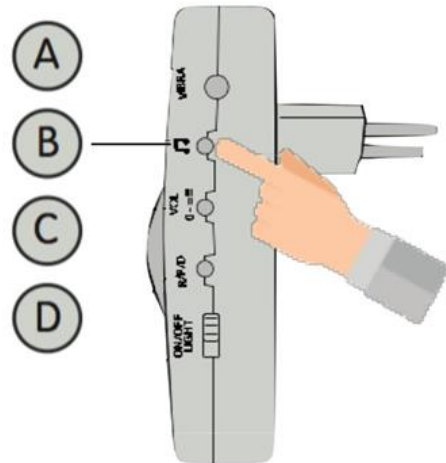

Helitugevust on võimalik reguleerida, selleks vajutage seadmest korduvalt nuppu (C).

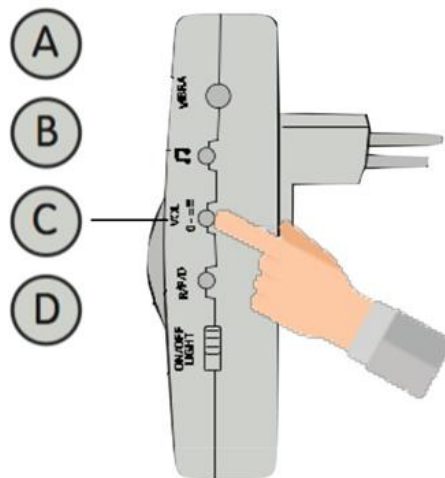

Testid:

Vilkurseadet on lihtne testida. Kui seade ei tööta vastavalt all olevatele juhistele, palume Teil ühendust võtta edasimüüjaga.

Vilkurseadme testimiseks:

- Ühendage seade pistikupessa.
- Käsu andmiseks vajutage nuppu Jenile saatjal.


Juhul kui Vilkurseade ei käivitu, proovige seda uuesti seadistada, et ühendada seadmeid omavahel. (Juhised leiata eespoolt)

Sätted:


Uus toode (Vilkurseade) ei ole seotud Teil juba olemasolevate Jenile toodetega.

Vilkurseade pistikusse seob kõik Teie seadmed omavahel. Selle jaoks tuleb hoolikalt järgida juhiseid.

- Ühendage Vilkurseade ja lülitage sisse vajutades nuppu (E).

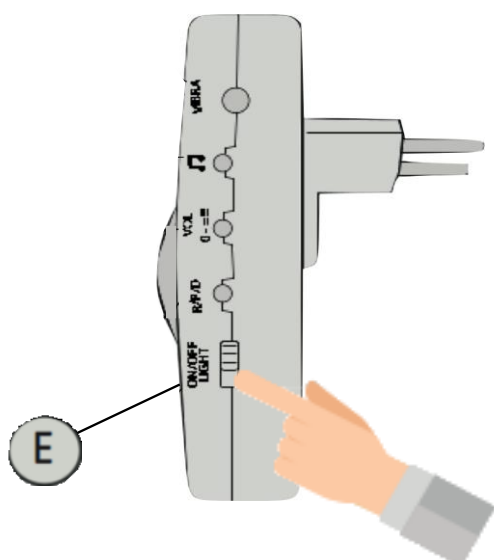


- Vajutage ühenduse nupule (D) ja vabastage nupp kohe, kui Viikurseadmel süttib punane tuli.

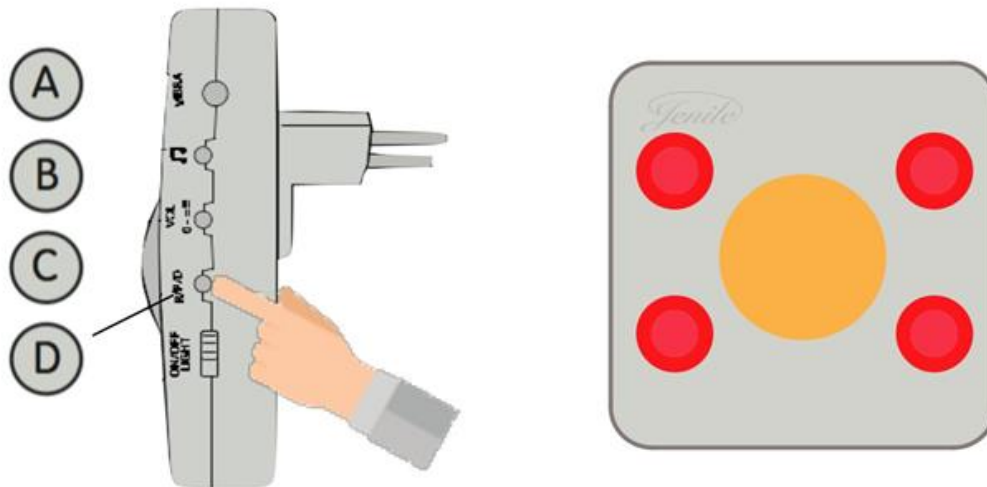


(Hoiatus: Ärge hoidke nuppu all, kui punane tuli on põlema süttinud, vastupidisel toimimisel on oht kõik eelmised ühendused kustutada.)

- Peale punase tule sisse lülitumist aktiveerige kohe Jenile saatja (vajutage kutsunginuppu, vajutage uksekella, hüüdke beebimonitori,... või viidake saatja juhistele.)

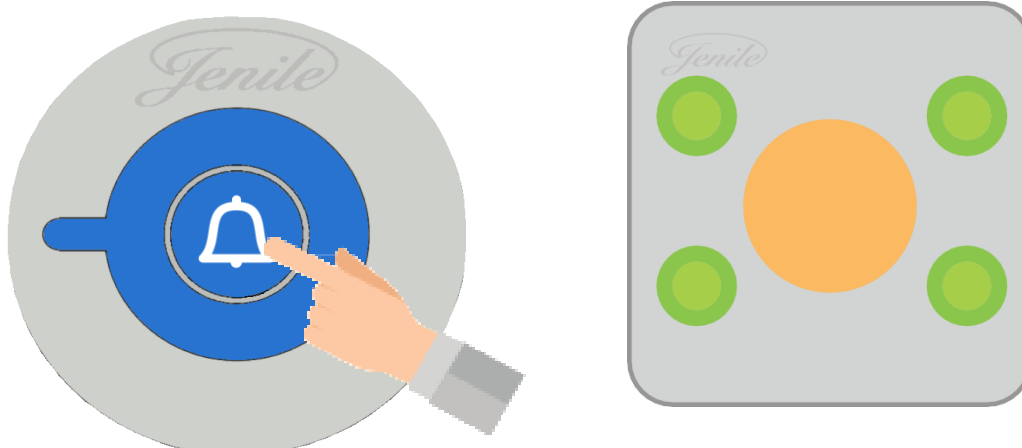


2 võimalust:

- Teie Vilurseade süttib: Ühendus on edukas, võite kasutada kõiki oma Jenile tooteid.

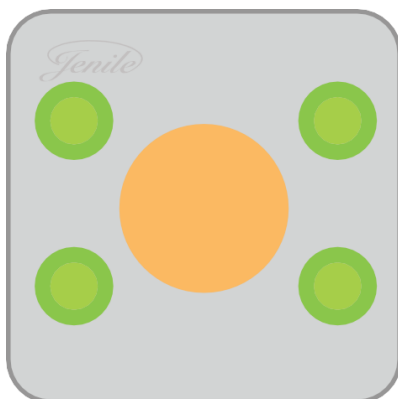

- Teie Vilurseade ei lülitu sisse: Ühendus ebaõnnestus, palun proovige uuesti.

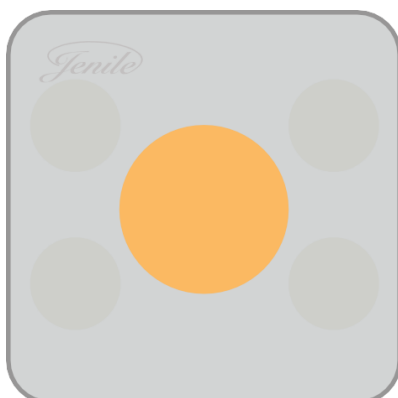


Märguanded ja värvid

Vilurseadme vastuvõtjat on võimalik kasutada kõigi Jenile saatjatega.

Kõigi märguannete puhul vilgub Vilurseadme ülemine osa kõikides värvides. Vilurseadme all servas olev valgus näitab, mis tüüpi märguandega on tegu. Allpool esitatud loetelu on pealiskaudne. Küsimuste korral võite julgelt pöörduda edasimüüja poole.


Punane: Hädaolukorrad

Suitsuandur
Gaasiandur, jne.

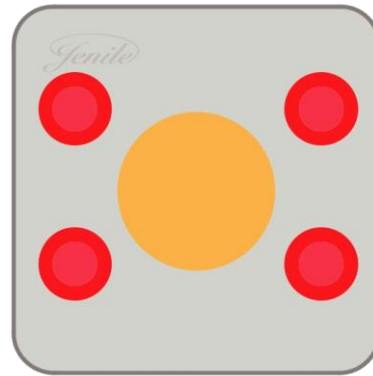


Roheline: Kellad

Värvitu uks: Alalised hoiatused
Ukse/akna avamise detektor
Liikumisandur

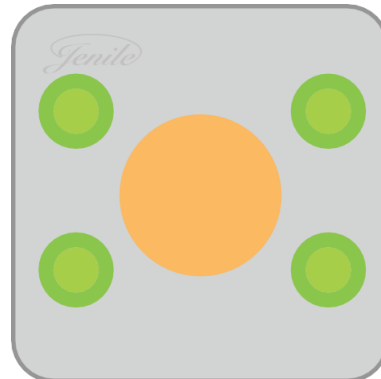


Sinine: Kõned

SMS Vilkur
Telefon, faks
Veebikõned (Skype, OOVVOO jne)

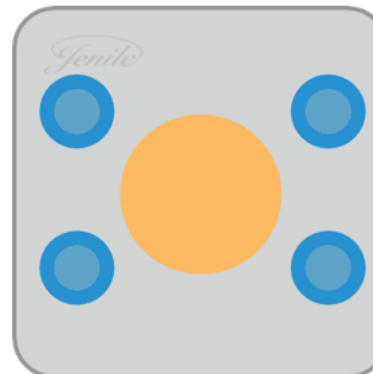


Värvitu : Kohaloleku hoiatused


Ukse/akna avamise detektor
Liikumisandur

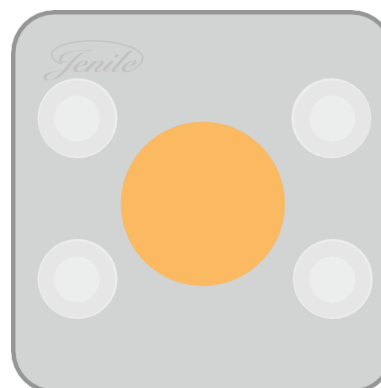

Punane: Häireolukorrad

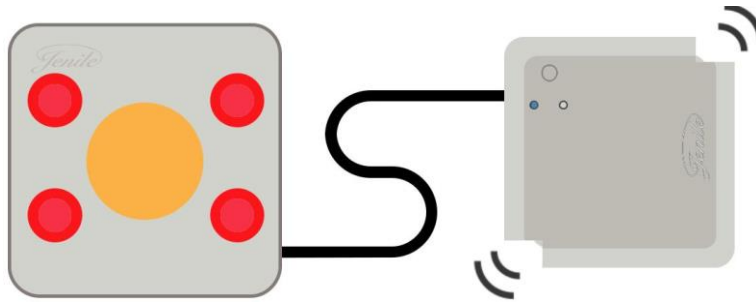

Roheline: Kellad

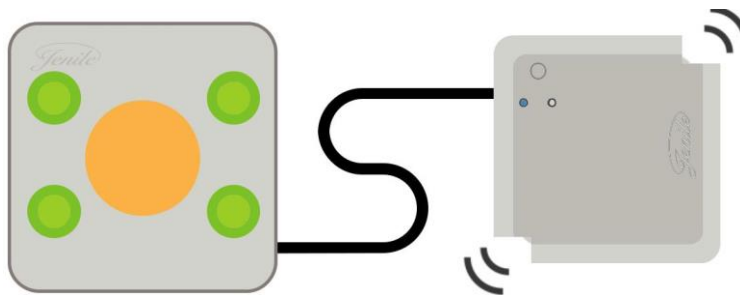

Sinine: Kõned



Neutraalne: üksikisendi olemasolu



Sätted


Peale Vibrapadja ühendamist Vilkur Kuubikuga või Vilkurseadmega vibreerib padi iga kord, kui Jenile vastuvõtja saab signaali saatjatelt. Juhul kui Te ei soovi, et mõni saatja teavitaks Teid, peate eemaldama soovimatu saatja vastuvõtjast. Juhiste saamiseks, lugege palun vastava vastuvõtja kasutusjuhendit.



1) Vajutage Vibrapadjal test-nuppu.


Kui padi vibreerib ja üleval nurgas põleb sinine LED tuli annab see märku, et padi on töökorras ning seda saab ühendada Jenile vastuvõtjaga.

Kui padi vibreerib ja märkate korraga põlemas sinist tuld padja ülaosas ja vibreerivat punast tuld padja allosas, siis peaksite patareisid vahetama.

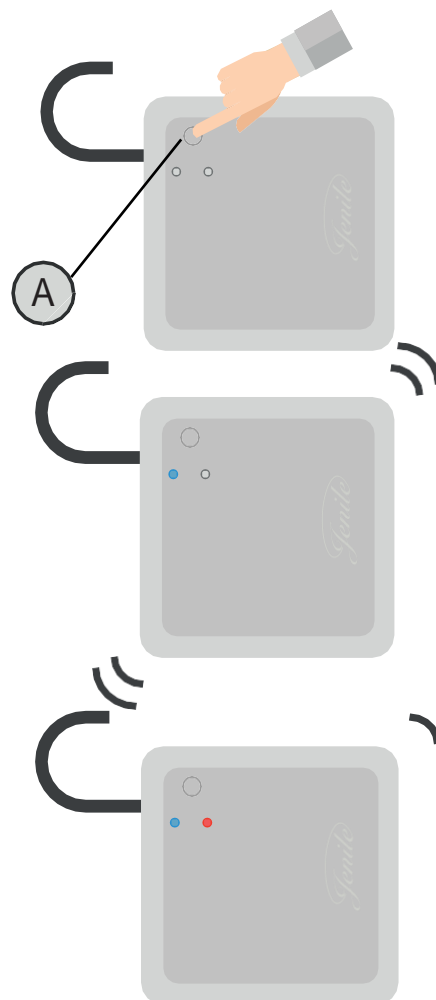


Kui padi üldse ei vibreeri, siis on patareid tühjaks saanud ja peaksite need koheselt välja vahetama.

2) Seejärel ühendage Vibrapadi enda vastuvõtjaga. Vajutage saatjale, mis on ühendatud Vilkur Kuubiku või Vilkurseadmega.

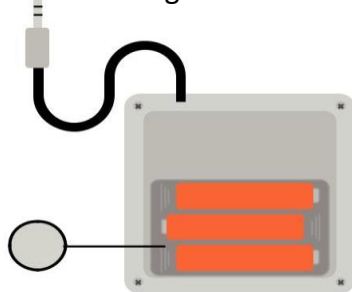


a) Vastuvõtja lülitub välja ja Vibrapadi hakkab vibreerima. See tähendab, et padi on töökorras.

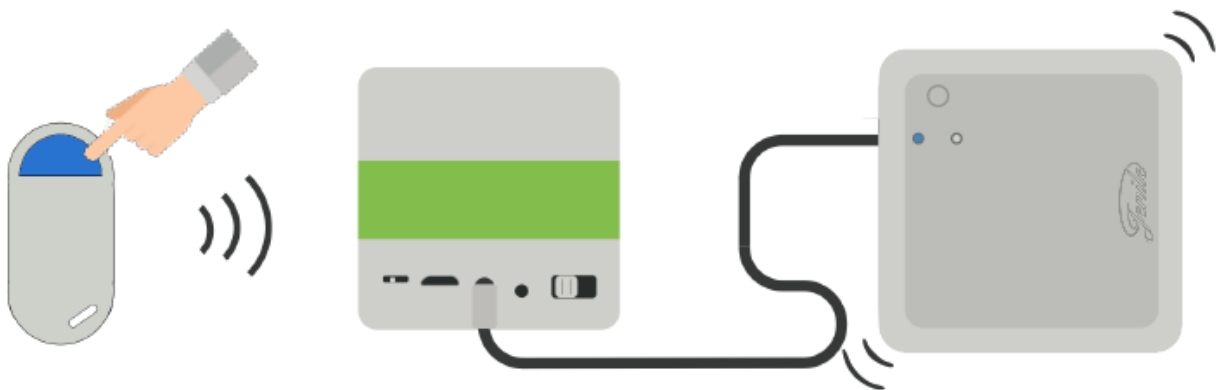


b) Märkate, et padi ei vibreeri samal ajal kui vastuvõtja on aktiveeritud. Vajutage Vibrapadjal test nuppu.



- Kui padi ei vibreeri ja ükski tuli ei põle, siis on patareid ammendunud.
- Kui Vibrapadi vibreerib, siis ei saa ta vastuvõtjalt signaali kätte.

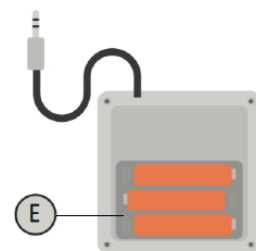

c) Kui Te märkate, et vastuvõtja ei lülitu sisse. Siis on saatja ja vastuvõtja vaheline ühendus kadunud.

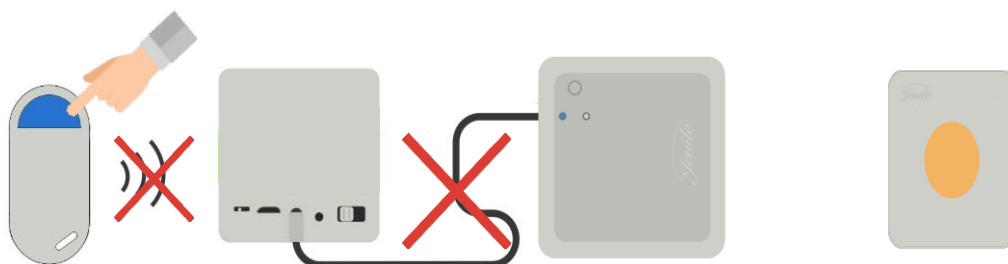

Selle taas aktiveerimiseks palun lugege vastuvõtja kasutusjuhendit.



Säilitamine ja hooldus

Vibrapadi ei vaja erilist hooldamist. Kui padi on märdunud, siis puhastage pinda pehme ebemevaba lapiga. Ärge kasutage hoolduse käigus puhastusvahendeid ega lahusteid!



www.jenile.com

Tootja:

Jenile International

40 boulevard de Nesles
77420 Champs-sur-Mame
Tel 01 60 05 10 21
contact@jenile.com
<http://www.jenile.com/>



Maaletooja:

Tervise Abi OÜ

Ädala 11
10614, Tallinn
Tel 673 7811
Fax 673 7819
info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee

