



UKSEKELL SP14

KASUTUSJUHEND

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.





Kõik tooted on
omavahel ühendatud.

Sisukord

Pakendi sisu	4
Uksefell SP14.....	5

Pakendi sisu



A




B



C

- A - Uksekell
- B - Patarei 23A 12V
- C - Kasutusjuhend

Ukse kell SP14

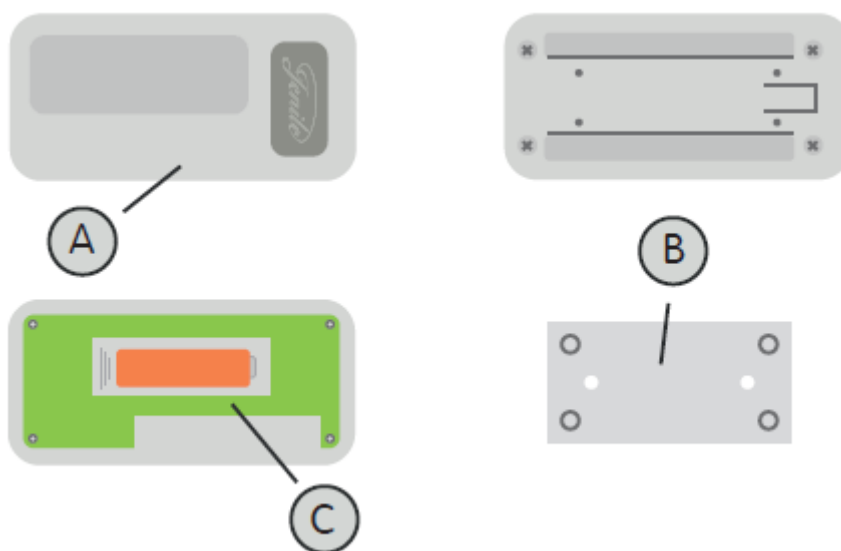

(A) - Uksekell

(B) - Kinnitus

(C) - Patarei 23A 12V

Tehnilised andmed

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) : 53x34x20mm

Värv: valge

Kaal: 20g

Toiteallikas: 23A 12V patarei

Autonoomia: 1 aasta

Raadiosagedus: 433,33 Mhz

2 aastane garantii

Paigaldus




Antud nupp on kinnitatud ukse lähedal asuvale seinale, kruvidega ja (B).

Tööpõhimõte

Signaalisüsteem koosneb vähemalt ühest saatjast ja ühest vastuvõtjast. Kui inimene vajutab uksekella muutub signaal raadiosageduse pulssideks. Need raadiosageduse pulsid (433 Mhz) saadetakse juhtmevabalt vilkur kuubikule või Jenile vibrapadjale. Sellisel juhul nad vilguvad/vibreerivad roheliselt.

Kasutamine

Uksekell töötab õigesti, kui vajutades uksekella nupule süttib punane LED tuli. Kui ei sütti punane tuli peate vahetama patareid (C).

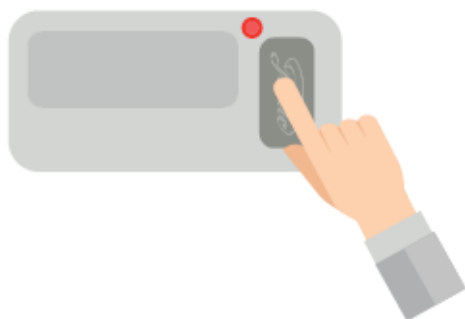

Ⓒ - Patarei 23A 12V

Seaded

Teie tooted on juba omavahel ühendatud. Kui ei ole, on ühendamine väga lihtne, palun vaadake vilkur kuubiku & vibrapadja seadeid.



www.jenile.com



Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, info@terviseabi.ee,
www.terviseabi.ee