




# Vibreeriv äratuskell RL19

## KASUTUSJUHEND

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.

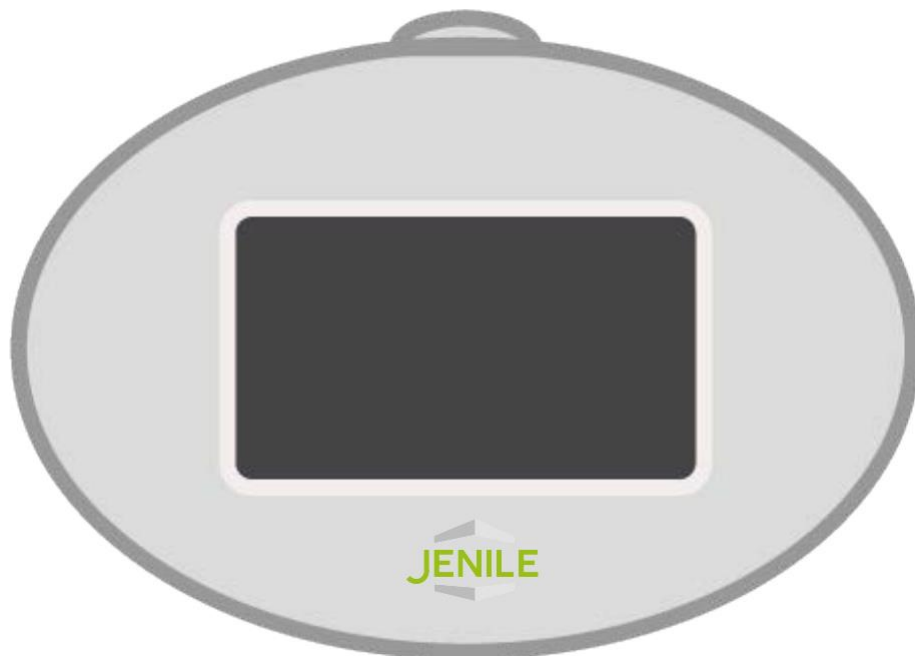




Kõik tooted on omavahel  
ühendatud.

# Sisukord


**4** : Kasutusjuhend

**5 - 13** : Vibreeriv äratuskell RL19

# Pakendi sisu

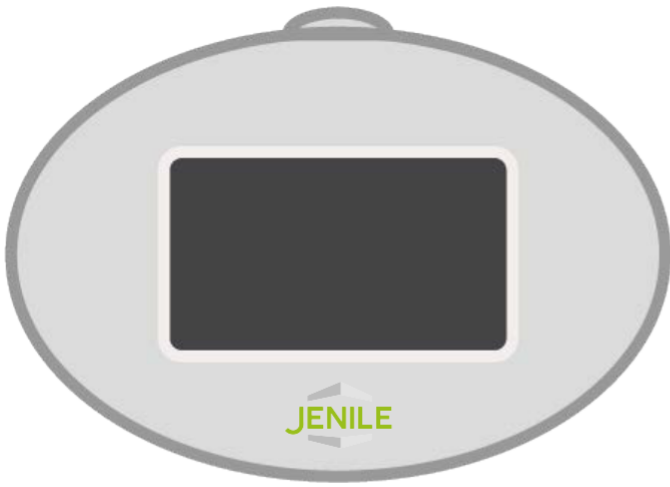


A

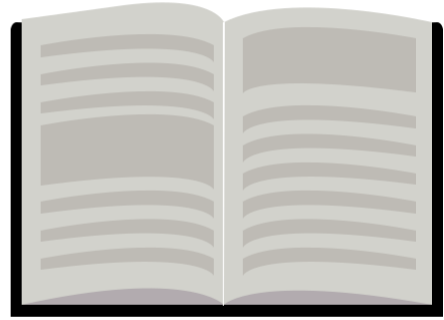

B

- A Vibreeriv äratuskell RL19
- B Kasutusjuhend

# Vibreeriv äratuskell

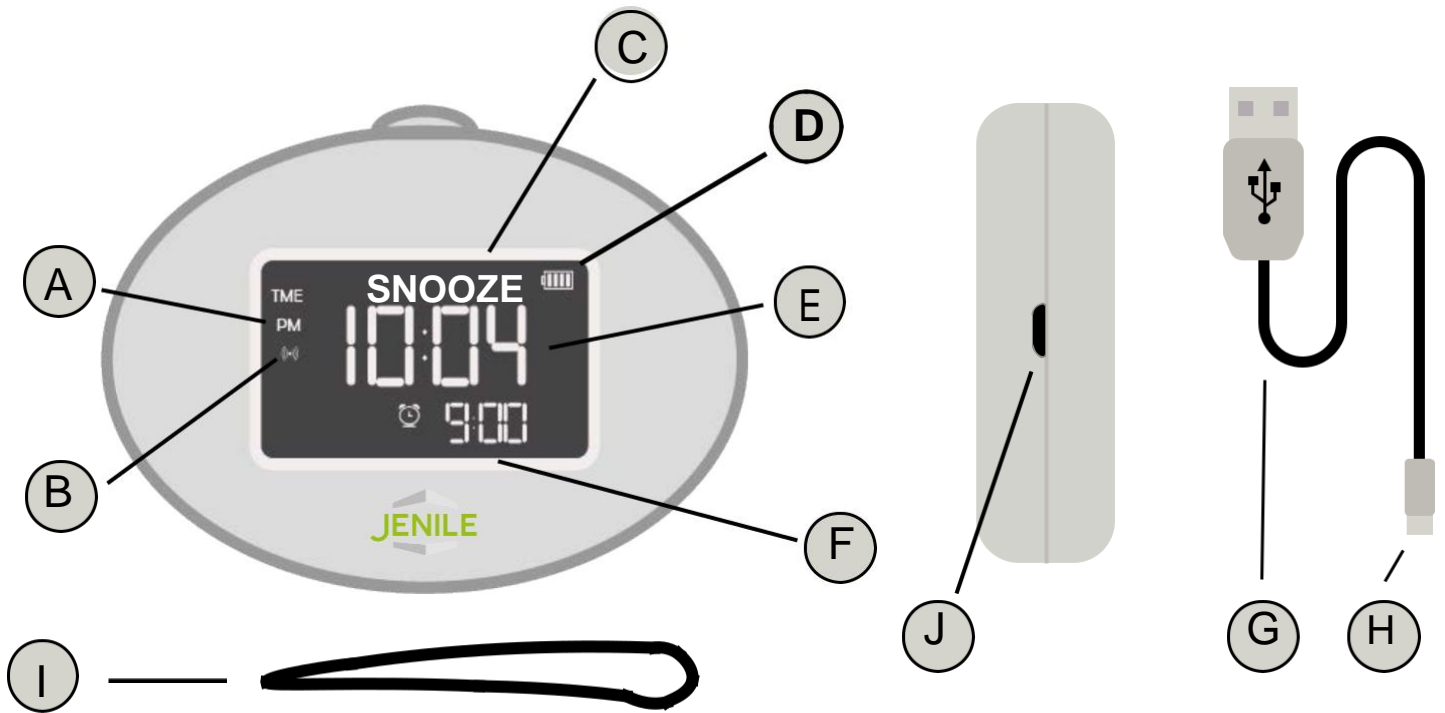

(A) Ajavorm 12 tundi

(B) Heli alarm aktiveeritud

(C) "Maga edasi" režiim aktiveeritud

(D) Aku laetuse tase

(E) Kellaaeg


(F) Äratuskella aeg

(G) USB ühenduspesa

(H) Micro USB üheduspesa

(I) Kinnituspael

(J) Micro USB laadimispesa

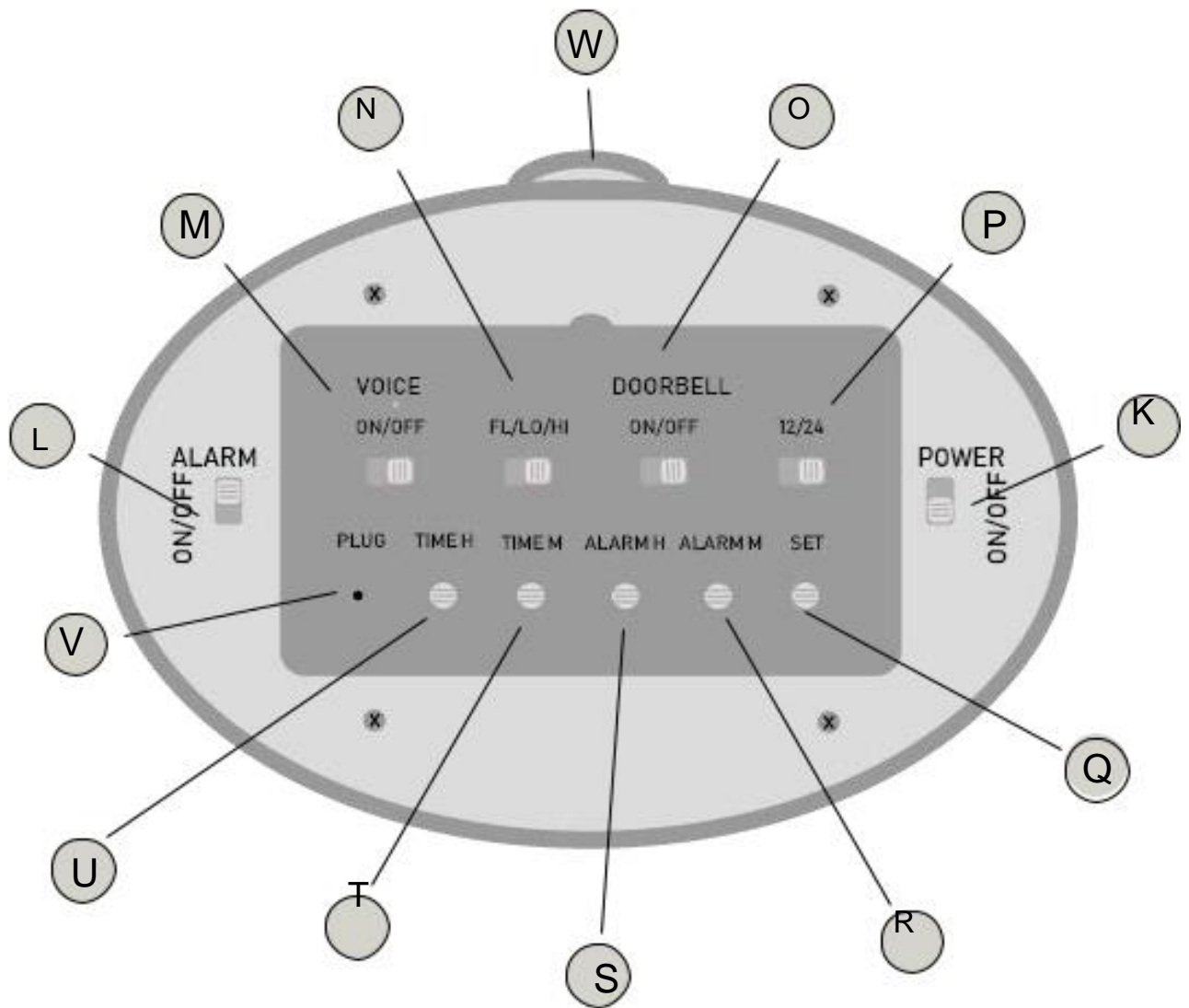

- |  |  |
|--|--|
| <b>K</b> Lüliti ON/OFF (sisse/välja) nupp  | <b>Q</b> Kellaaja/alarmi seadistamisnupp                                 |
| <b>L</b> Alarmi ON/OFF (sisse/välja) nupp  | <b>R</b> Alarmi minuti seadistamisnupp                                   |
| <b>M</b> Alarmi heli ON/OFF (sisse/välja) nupp   | <b>S</b> Alarmi tunni seadistamisnupp                                    |
| <b>N</b> FL : Ainult vilkumine<br>LO: Vilkumine + vibreerimine<br>HI: Vilkumine + tugev vibreerimine | <b>T</b> Kellaaja minuti seadistamisnupp                                 |
| <b>O</b> Jenile uksekella ON/OFF (sisse/välja) nupp  | <b>U</b> Kellaaja tunni seadistamisnupp                                  |
| <b>P</b> 12 : Ajavorm 12 tundi<br>24 : Ajavorm 24 hours  | <b>V</b> Ühenduspistik   |
|  | <b>W</b> SNOOZE ("Maga edasi") nupp, mis lükkab äratust 10 minutit edasi |

# Tehniline kirjeldus

**Juhtmevaba**

**Töötab liitiumi patareiga (komplektis kaasas)**

**Kaal** : 132 g

**Levib** maksimaalselt 150 meetrit vabas ruumis

**Raadiosagedus** : 433 Mhz

**Mõõtmed** (Kõrgus x Laius x Sügavus) : 8,5 x 11 x 2,5 cm

**Aku autonoomia** : 2 nädalat (sõltuvalt kasutamisest)

**Paigalduskomplekt on kaasas**

**Kiire ja lihtne** seadistada ja ümberseadistada

**2-aastane garantii** (aku garantii 1 aasta)


## Funktsioon

Vibreeriv äratuskell töötab eraldi või koos Jenile uksekellaga. See annab edasi vilkumist ja/või äratuskella vibreerimist ja/või Jenile uksekella teadet.


# Kasutamine ja aku

Läbi äratuskella jõuab sinuni Jenile uksekella signaal.


Jenile's äratuskell sisaldab laetav aku. Aku mark üleval paremas nurgas näitab tema laetavuse taset :

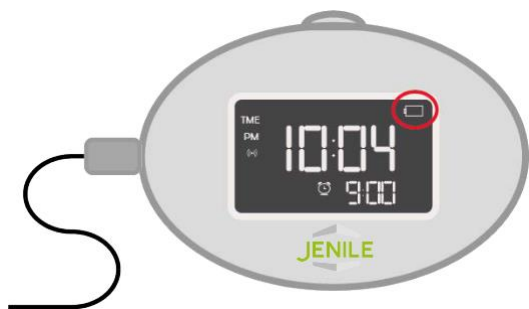

Madal akutase:  
Jenile äratuskell vajab laadimist.

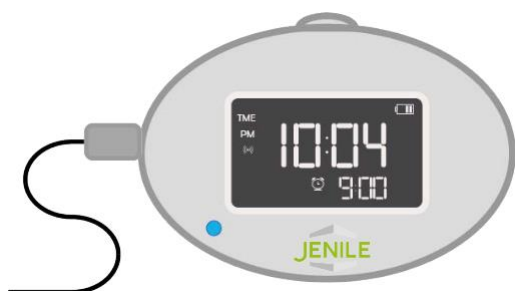

Sinine LED tuli:  
Aku laeb.

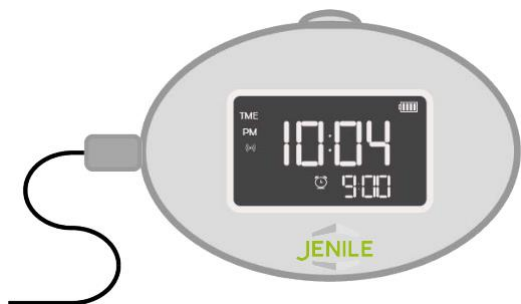

Kui LED tuli ei põle:  
Aku on täis laetud.



# Kasutamine koos Jenile uksekellaga



Kui (N) on FL, siis sul on : Roheline LED tuli & Vilkumine, kui **inimene helistab uksekella.**




Kui (N) on LO või HI, siis sul on : Roheline LED tuli & vibreerimine, kui **inimene helistab uksekella.**



Kui roheline LED tuli vilgub üksi, siis see hoiatab, et keegi helistab uksekella.

## Alarm funktsiooni kasutamine

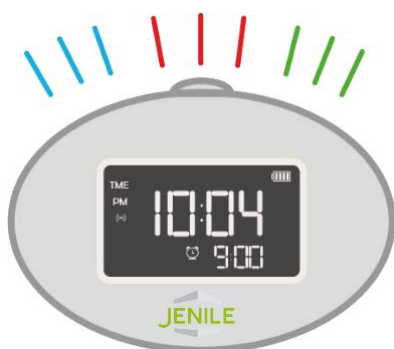

või



Kui äratuskella valgus süttib ja/või vibreerib ilma rohelise LED tuleta:  
On aeg tõusta!




Alarmi vaigistamiseks vajutage SNOOZE ("Maga edasi") (W) nuppu


# Katsetamine

Vibreerivat äratuskella on kerge katsetada. Kui, allpool olevat juhendit kasutades, äratuskell ei tööta, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.


Selleks, et katseada vibreerivat äratuskella, lülitage see sisse vajutades ON(sees) **(K)** nuppu. Edasi kontrollige, et äratuskella nupp ON(sees) **(L)**, ja lisaks ka uksekella nupp ON (sees) **(O)**.

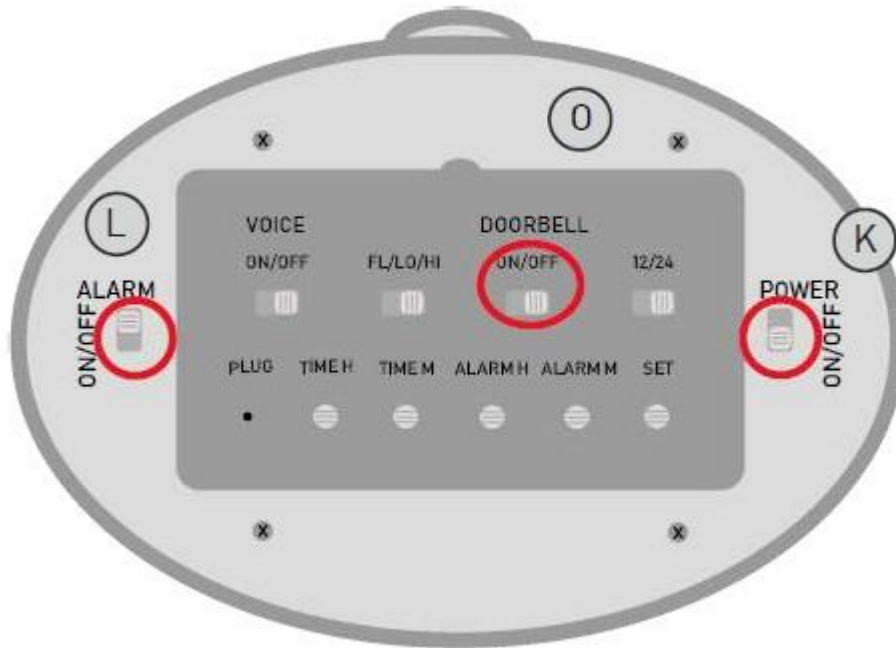

Kui nupud on õigestes asendites, siis palun vajutage Jenile uksekella.

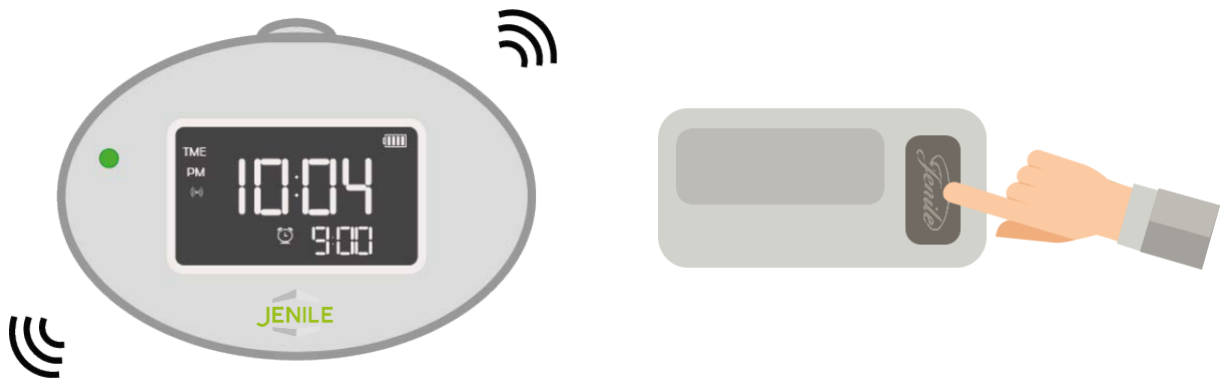

Kui äratus ei lähe tööle, palun kontrollige, et aku ei ole pidevast laadmisest kurnatud:

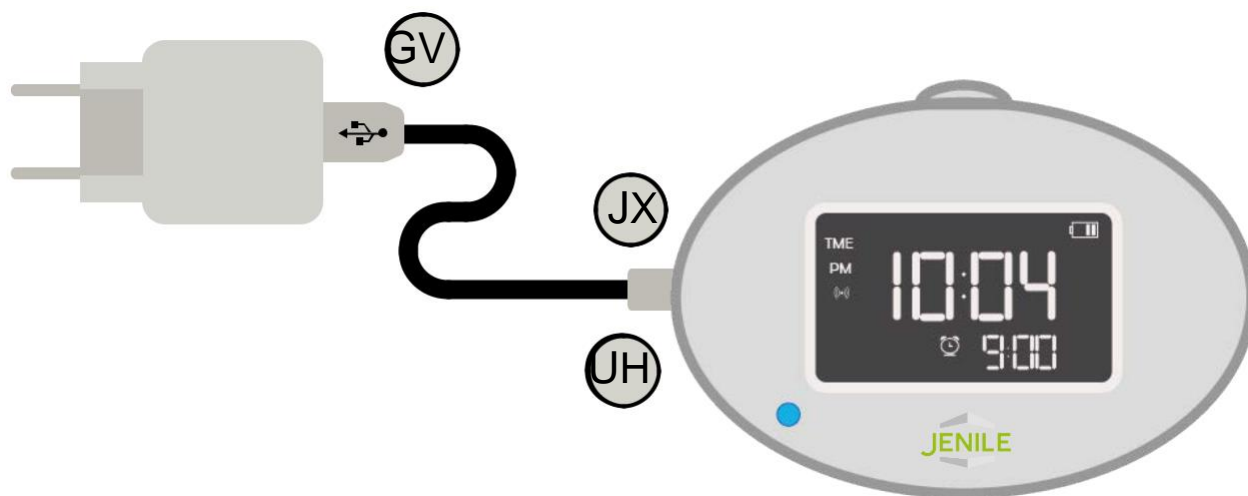



Ühendage USB kaabel (G) adapterisse. Ühendage Micro-USB ots (H) äratuskella laadimispeassa (J).

Kui sinu seade ikka ei tööta, siis me soovitame sul üle vaadata Jenile uksekella ja äratuskella omavahelist ühendust.

# Seaded



**HOIATUS:** Seadete omavahelise ühenduse saavutamisel edasine ühendamine pole vajalik. Kui te siiski soovite uuesti ühendada, palun järgige alljärgnevat kasutusjuhendit.

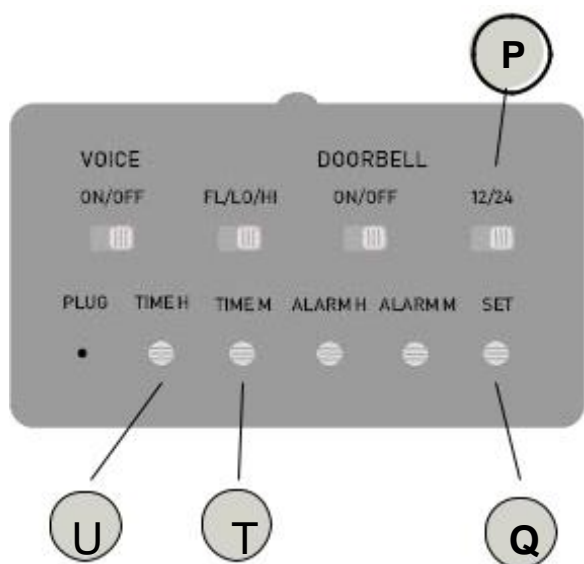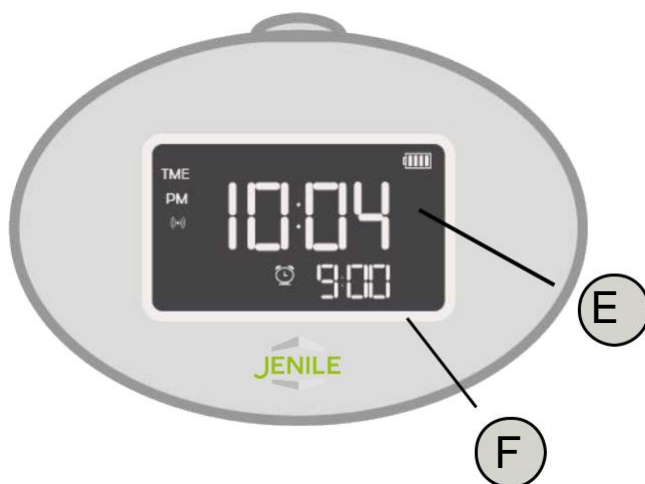

## 1. Kellaaja seadistamine:

Lülitage (P) nupp seadistamiseks 24h (Prantsuse aeg) või 12h (Inglise aeg).


Vajutage (Q) nuppu. "Aeg" (E) vilgub.

Kasutage (U) ja (T) nuppe muutes aega ja vajutage (Q) nuppu.


## 2. Äratuskella seadistamine:


Vajutage (Q). "Alarm" (F) vilgub.


Kasutage (S) ja (R) nuppe muutes aega ja vajutage (Q) nuppu.

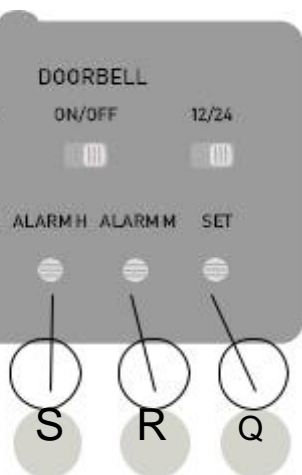


### 3. Uksekella ühildamine uksekellaga:

Vajuta  nuppu "ON", et aktiveerida uksekell.


Kasutades hambaorki, vajuta ühenduspistiku nuppu , kuni punane tuli süttib äratuskella esiküljel.

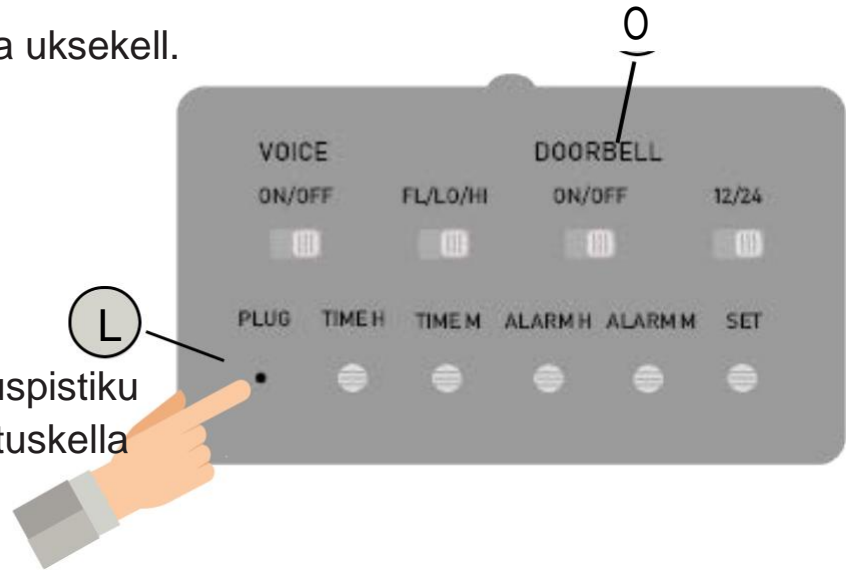

Koheselt vajutage Jenile uksekella, mis paneb punase valguse vilkuma.

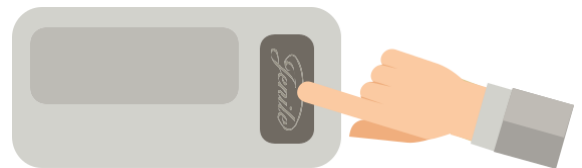

Kui alarm vibreerib või vilgub, siis sinu äratuskell on ühendatud Jenile uksekellaga.

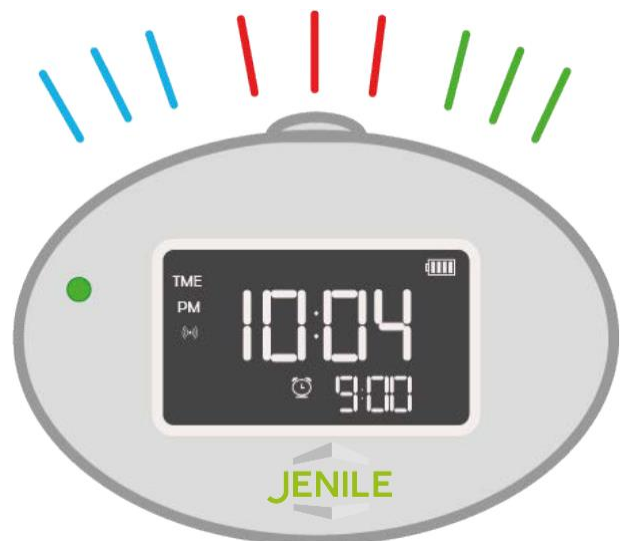



[www.jenile.com](http://www.jenile.com)



Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811,  
[info@terviseabi.ee](mailto:info@terviseabi.ee), [www.terviseabi.ee](http://www.terviseabi.ee)