




# VEEKINDEL UKSEKELL SPE17

## KASUTUSJUHEND

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.

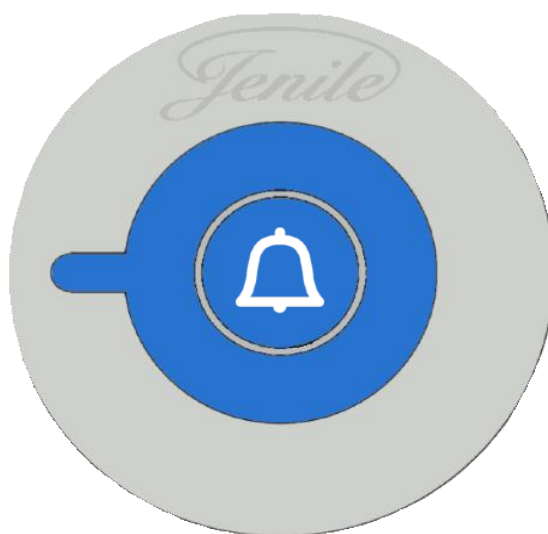





Kõik tooted on omavahel ühendatud.

# Sisukord

Veekindel uksekell SPE17 .....	4
Tehnilised andmed .....	4
Paigaldamine:.....	5
Tööpõhimõte: .....	6
Kasutamine: .....	7
Seaded: .....	7

# Veekindel uksekell SPE17

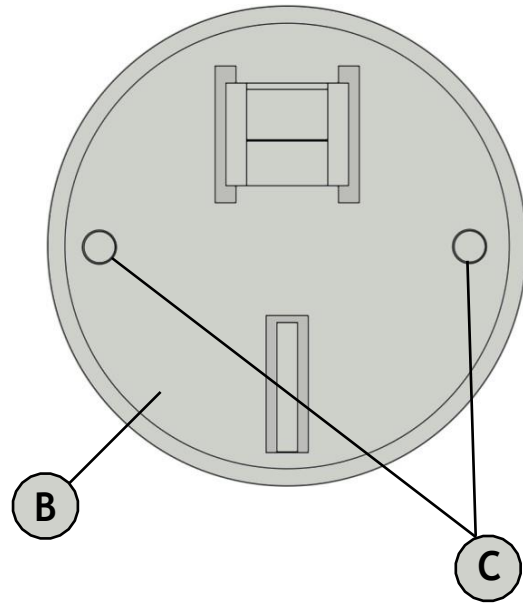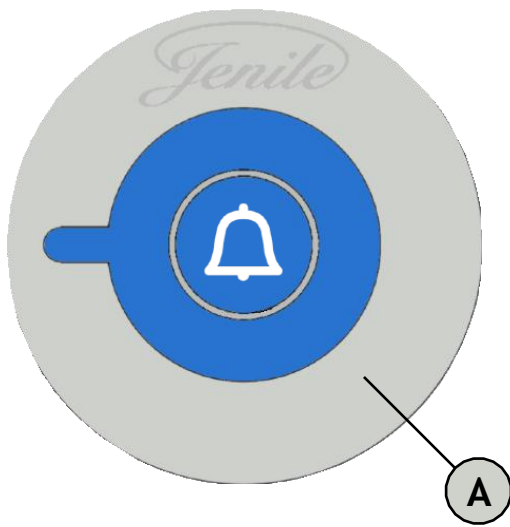

- A** - Lüliti
- B** - Plastikust tagus
- C** - Kruvi augud

## Tehnilised andmed

**Kaal :** 34 g (koos ümbrisega)

**Värv :** Sinine/Valge

**Mõõtmed (kõrgus x laius X sügavus ) :** 60 x 17 x 60 mm


**Raadiosagedus :** 433,33Mhz

**Toiteallikas :** 3V liitiumpatarei (kaasas)

**Autonoomia:** 1aasta

2 aastane garantii



## Paigaldamine

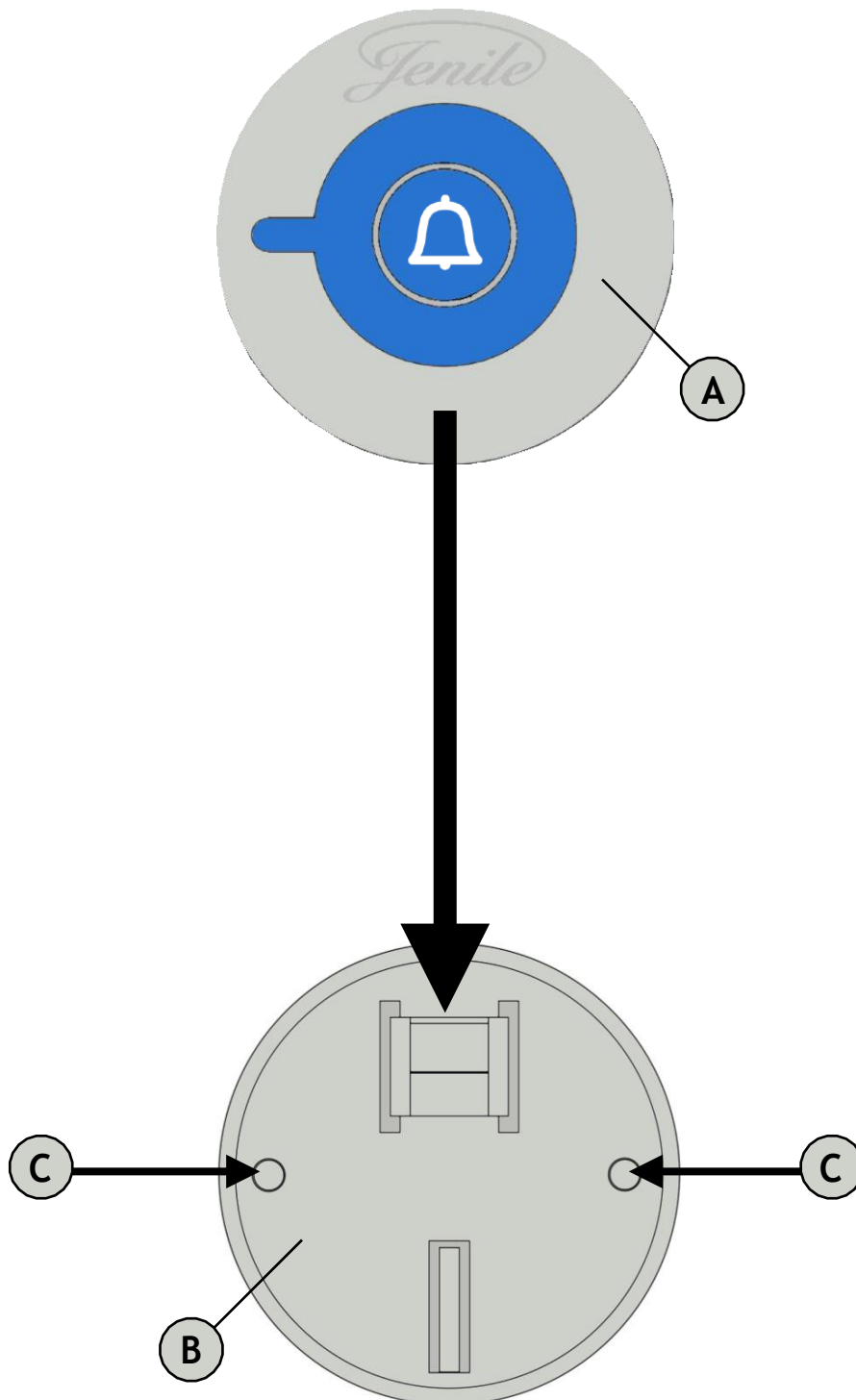

Veekindel uksekell paigaldatakse plastikust taguse (B) ja kahe kruviga (C) välisukse lähedale seinale.

## Tööpõhimõte

Signaalisüsteem koosneb vähemalt ühest saatjast ja ühest vastuvõtjast. Kui inimene vajutab uksekella muutub signaal raadiosageduse pulssideks. Need raadiosageduse pulsud (433 Mhz) saadetakse juhtmevabalt vilkur kuubikule või Jenile vibrapadjale. Sellisel juhul nad vilguvad/vibreerivad roheliselt.

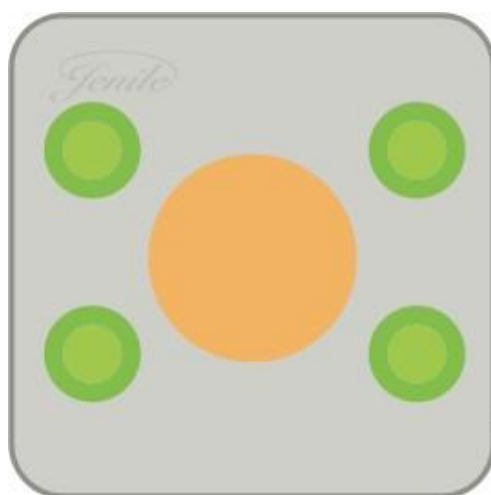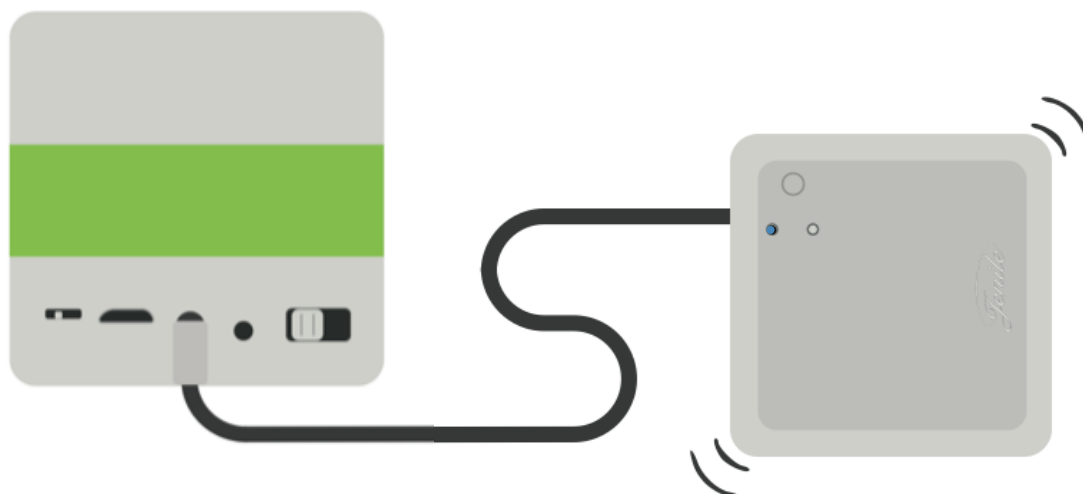

Uksekell on veekindel ja seda saab kasutada välitingimustes.



## Kasutamine

Uksekell töötab õigesti, kui uksekella nupule vajutades süttib punane LED tuli. Kui tuli ei sütti, siis võtke ühendust edasimüüjaga.

## Seaded

Teie tooted on juba omavahel ühendatud. Kui ei ole, on ühendamine väga lihtne, palun vaadake vilkur kuubiku & vibrapadja seadeid.



[www.jenile.com](http://www.jenile.com)

Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, [info@terviseabi.ee](mailto:info@terviseabi.ee), [www.terviseabi.ee](http://www.terviseabi.ee)

