




Tasku vibratsiooniseade

KASUTUSJUHEND

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.

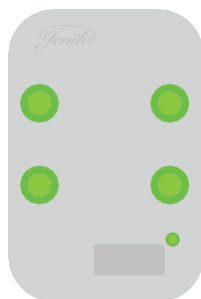



Kõik tooted on omavahel
ühendatud

Sisukord

Pakendi sisu.....	4
Tasku vibratsiooniseade VP15.....	5
Tehniline kirjeldus.....	5
Kasutamine ja aku.....	6
Testimine	7
Seaded.....	8
Häired ja värvid.....	10

Pakendi sisu



(A)




(B)



(C)

- (A) - Tasku vibratsiooniseade
- (B) - USB juhe
- (C) - Kasutusjuhend

Tasku vibratsiooniseade VP15

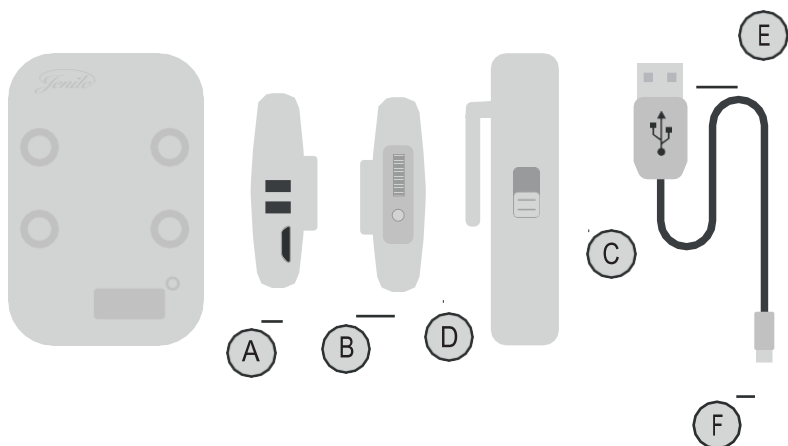

(A) - Micro USB laadimispesa

(B) - ühenduse pistik

(C) - Sisse (ON) / Välja (OFF)

(D) - Vibratsiooni tugevuse seadistaja

(E) - USB ühenduspesa

(F) - Micro USB ühenduspesa

Tehniline kirjeldus

Juhtmevaba

Laetav aku

Kaal: 60g

Levib maksimaalselt 200 meetrit vabas ruumis

Ühendatud toodete arv: maksimaalselt 20 seadet

Toiteallikas: 3.7V 2200mAh Liitium aku.

Laadimispinge peab olema piiratud kuni 4.2V

Ooterežiim : <4,5mA

Töörežiim : <800mA

Raadio sagedus : 433Mhz

Dekodeerimise vorming:MCU


Mõõtmed (Kõrgus x Laius x Sügavus): 6x8x1,3cm

Aku autonoomia : ühe laadimiskorraga 1 kuu (sõltuvalt kasutamisest)


2-aastane garantii (aku 1 aasta)

Kasutamine ja aku


Läbi tasku vibratsiooniseadmele jõuab sinuni Jenile uksekella ja ka teiste Jenile seadete signaaliga. Signaali allikaid ja häirete tüüpe aitavad eristada 4 erineva rütmiga vibratsioonid ja 4 erinevat värvitooni.

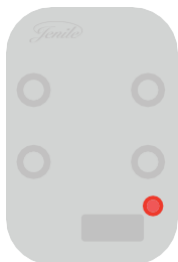

Punane LED : Aku tühi,
Seade vajab laadimist

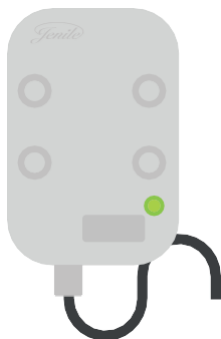

Roheline LED : aku laeb

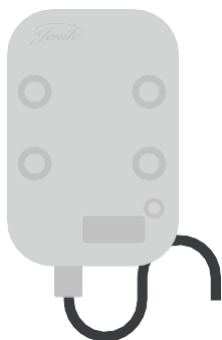


Ükski LED ei põle:
aku on täis laetud


Hoiatus: On võimalik, et LED tuled ei lähe põlema, kuna seade aku on täielikult tühjenenud. Siis tuleb seade laadima panna.

Testimine

Jenile taskuvibratsiooniseadet on lihtne testida. Juhul kui vibratsiooniseade ei tööta vastavalt alltoodud juhistele soovitame teil ühendust võtta edasimüüjaga. Vibratsiooniseade testimiseks vajutage oma uksekella.

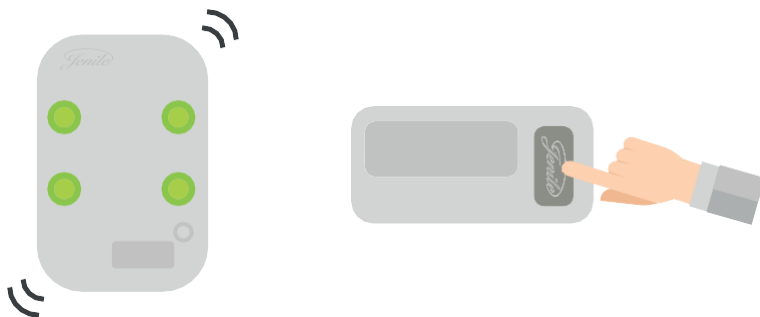


Kui seade annab märku, kuid vibratsioon puudub palun kontrollige, (D) kas teie seade on seadistatud miinimumile.

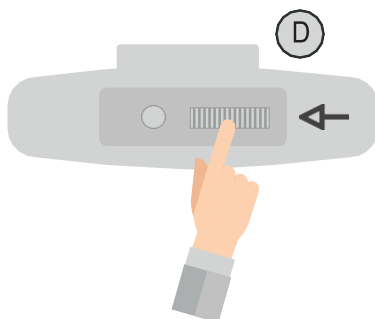


Kui roheline LED seadme paremal allosasei lähe põlema tähendab see, et seadme aku on täielikult laetud.

Seaded


Seadete omavahelise ühenduse saavutamisel edasine ühendamine pole vajalik. Kui te siiski soovite uuesti ühendada, palun järgige alljärgnevat kasutusjuhendit.

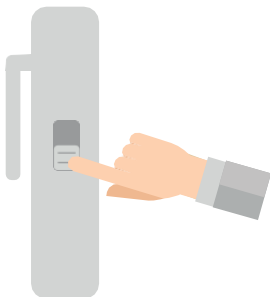

1. Aktiveeri seade vajutades alla ON nupp.

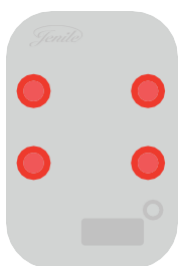


2. Vajuta lüliti(C) kuni seadel lülitub sisse punane tuli (HOIATUS: Ära hoia nuppu all liiga pikalt, kuna siis võivad kustuda ära kõik eelnevad ühendused)

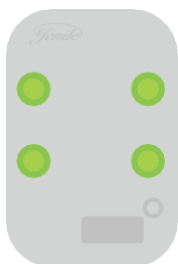


3. Koheselt peale lüliti vajutamist käivita saatja (helista uksekella, vajuta puldile, hõika beebimonitori, ...)


3 võimalust:

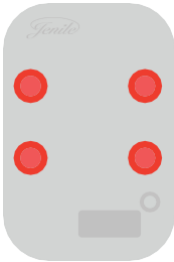

Seade muutub punaseks, kuid ei vibreeri. Ühenduse loomine ebaõnnestus. Saatja ei saanud signaali.

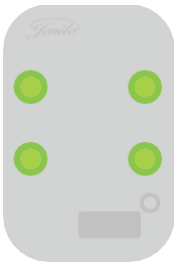


Seade vilgub värviliselt (roheline, sinine, punane või valge, olenevalt alarmi tüübist) ja vibreerib. Ühendus töötab korralikult.

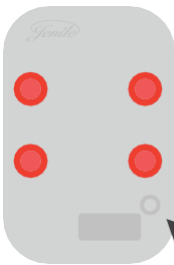

3korda

Punane tuli vilgub 3 korda, vibreerimist ei toimu. Ühendus ei toimi, kuna vajutasite liiga pikalt pluss nuppu ©. Te kustutasite seadme mälu ja peate looma uuesti kõik ühendused.

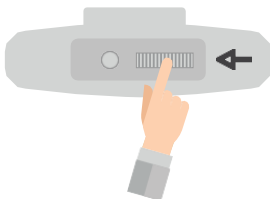


4. Vali vibratsioonitase, mis on sulle kõige sobivam.


Häired ja värvid

Tasku vibratsiooniseade VP15 saab kasutada kõikide Jenile sagedusel töötavate seadmetega.


Kõikide häirete puhul seade vilgub ja vibreerib üheaegselt. Nii valgustuse värvid, kui ka vibratsiooni rütm aitavad tuvastada alarmi tüüpi. Ukselellale on see roheline, 2 vibratsiooni ja 5 kordusega.

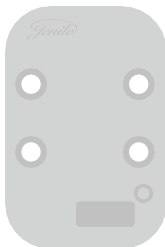

VALGE ja väga kiire vibratsioon
(x4 koos 4 kordusega) Ukse/akna
avamine, liikumisandur
Arvuti kõned (skype,..)

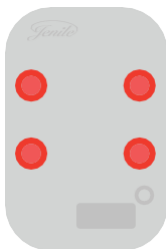


PUNANE ja kiire vibratsioon
(x3 koos 4 kordusega) Hädalukorrad
-Suitsuandur
-Gaasiandur,
-Põrandaandur, ..

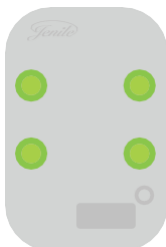


ROHELINE ja keskine vibratsioon
(x2 korda 5 kordust) : Kellad

-Uksekell
-Videokell
-Video värav
-Akustiline saatja
-Kutsungi nupp, ...

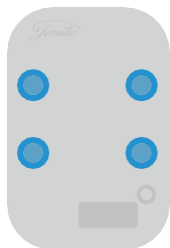

**SININE ja aeglane
vibratsioon (x1 koos 5
kordusega) Kõned
SMS, Telefon,
faks, ...**

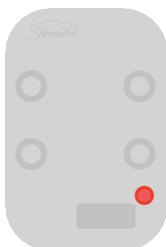

**ILMA VÄRVITA ja väga aeglane
vibratsioon (x1 vibratsioon iga 20
minuti tagant) aku tühjenemise
teadaanne.**



www.jenile.com



Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811,
info@terviseabi.ee, www.terviseabi.ee