


Garantii



Kasutusjuhend

Veetaseme andur DEI 14

Spetsiaalselt välja töötatud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele

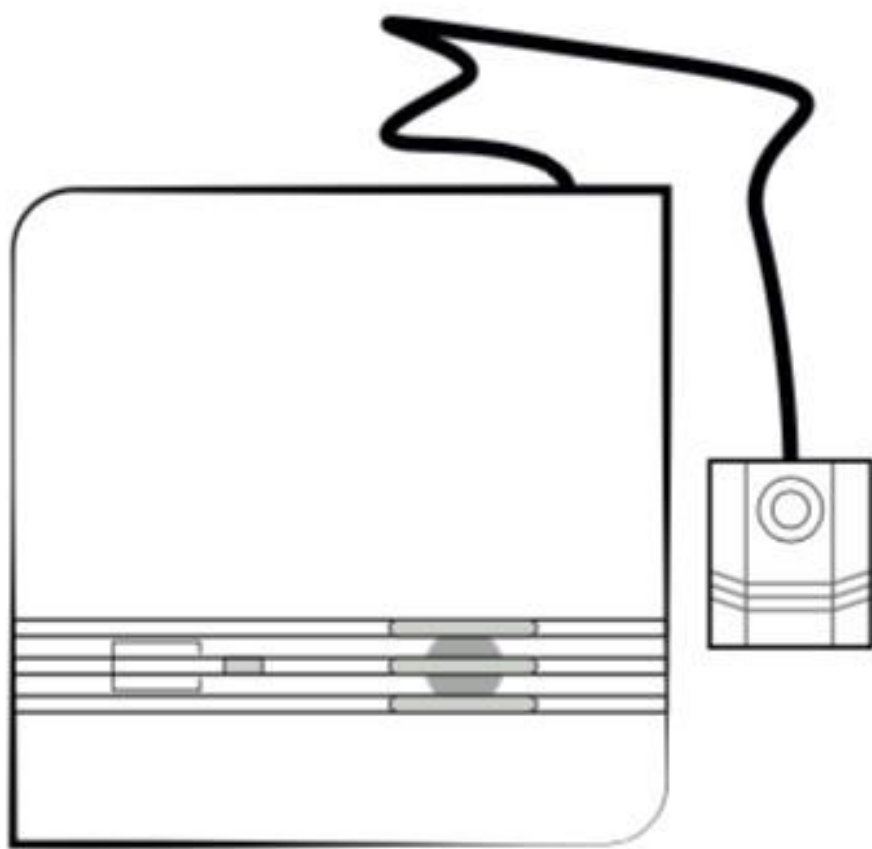

Võtke meiega ühendust:

Küsimuste või paigaldusega seotud abi jaoks võtke ühendust edasimüüjaga:


• Maaletooja:
Tervise Abi OÜ
Ädala tn 11, Tallinn 10614

• Diana Legušs
diana@terviseabi.ee
+372 5645 1045



Kõik Teile koos üleantud esemed on teineteisega juba ühendatud.

Teie paki sisu

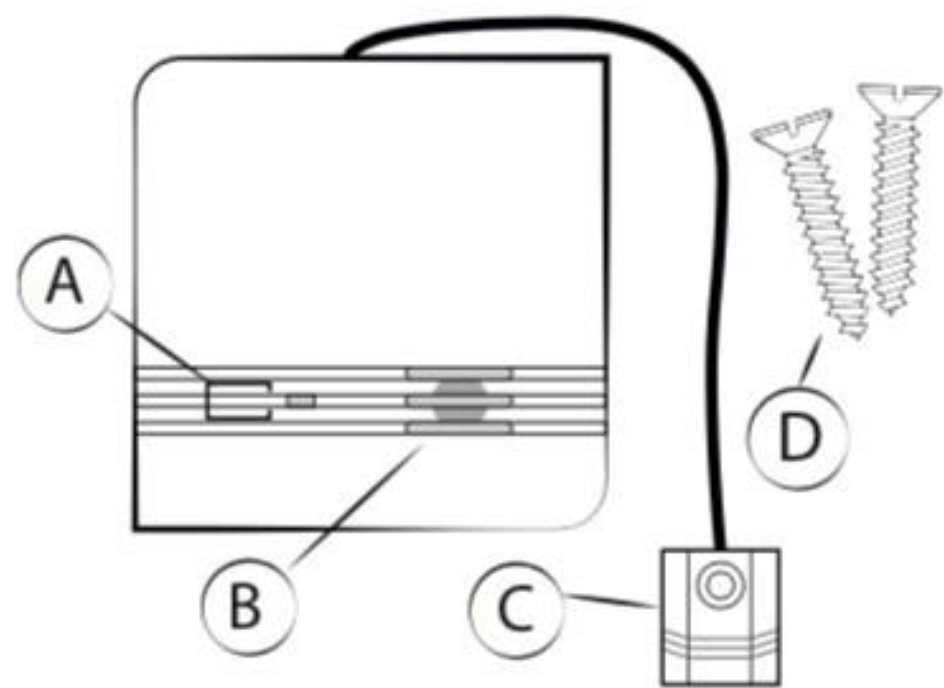

A: Testimisnupp
B: Heliväljund
C: Sond
D: Kruvi

Tehnilised omadused

Juhtmevaba seade

Kaal: 136g
Mõõtmed: L x K x S: 8,9 x 8,9 x 2,8 cm (toetuseta) / 8,9 x 8,9 x 3,5 cm (toetusega)
Kaugus: max 50 meetrit vabal väljal
Vooluallikas: patareid (2x1,5V AA)
Ootepinge: <10 µA
Tööpinge: <50mA
Raadiosagedus: 433 Mhz
Dekodeerimisvorming: MCU
Helitugevus: 85 dB
Temperatuurid: 0-60°C
Niiskus: 0 - 80%

2-aastane garantii

Tööpõhimõte

Signaalsüsteem koosneb vähemalt ühest saatjast ja ühest vastuvõtjast. Lubatud veetaseme ületamisel korjab veetaseme andur (saatja) üles signaali ja muudab selle raadioimpulssideks.

Need raadioimpulssid (433 MHz) edastatakse juhtmevabalt Jenile välk- või vibreerivaile vastuvõtjatele. Fikseeritud väljud, CBM14 vilkurkuubikud, VPWS14 tasku vibratsiooniseadmed või pistikusse ühendatavad FP16 fikseeritud vilkurseadmed süttivad seejärel punaselt ja vibreerivad.

Seaded

Ühendus toodete vahel luuakse automaatselt. Kui ühel vastuvõtjal ei ole võimalik signaali vastu võtta, siis võtke ühendust edasimüüjaga.

Paigaldamine

Seadme alusel on kaks väljalõiget, mida kinnituskruvid läbivad. Anduri paigaldamiseks:

1. Eemaldage kruvid selleks, et eraldada ülemine kate aluse küljest.
2. Puurige eelkruvitud augud aluse külge.
3. Kasutades kaht puuritud auku nädisena, puurige kinnituspinnale kaks auku (sein, mööbel jne).
4. Sisestage prundid, kui paigaldamine toimub krohv- või telliskiviseinale.
5. Kruvige veetaseme andur seina külge.
6. Asetage kate alusele ja sulgege see kahe kruviga.
7. Leidke sondi plastmassist hoidja ja eemaldage liimteibi küljest kaitsekiht.
8. Asetage sond plastmassist hoidjale ja suruge see vastu soovitud kohta.

Test

1. Veetaseme anduri testimiseks vajutage pikalt testimisnupule (A). LED vilgub seejärel mitu korda punaselt ja roheliselt. Ohu tuvastamisel süttivad kõik Jenile vastuvõtjad punaselt.

2. Teil on võimalik oma veetaseme andur seada vaiksesse režiimi. Selleks vajutage üks kord lühidalt testimisnupule (A). Seejärel näete kiiresti vilkumas rohelist valgust. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage veel üks kord testimisnupule (A).

Hoiatus: Kui teie veetaseme andur on vaiksese režiimis, siis ei teavita see teid enam kõrge veetaseme esinemisest. Seetõttu veenduge, et seadistate selle tagasi tavarežiimi, kui näete seadmel kiiresti vilkumas rohelist tuld.
3. Teie andur on aktiveeritud, kui see vilgub 1 korra roheliselt iga 30 sekundi jooksul. Kui nii ei ole, siis vajutage lühidalt testimisnupule (A) 1 kord selleks, et kiiresti naasta tavarežiimi.

Kasutamine

Paigaldage veetaseme andur seinal. Langetage sond (C) maapinnale või soovitud kõrgusele selleks, et tuvastada veetase. Kui sond puutub kokku veega, siis edastab veetaseme andur alarmsignaali Jenile välk- ja vibreerivaile alarmidele. Kui sond puutub veega kokku kauem kui 2 minutiks, siis edastab veetaseme andur taas alarmsignaali juhtpaneelile. Veetaseme andur edastab juhtpaneelile iga juhtumi kohta kokku 2 alarmsignaali. Seejärel lülitub see ooterežiimi.