




# Vibrapadi CoV15

## Kasutusjuhend

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.

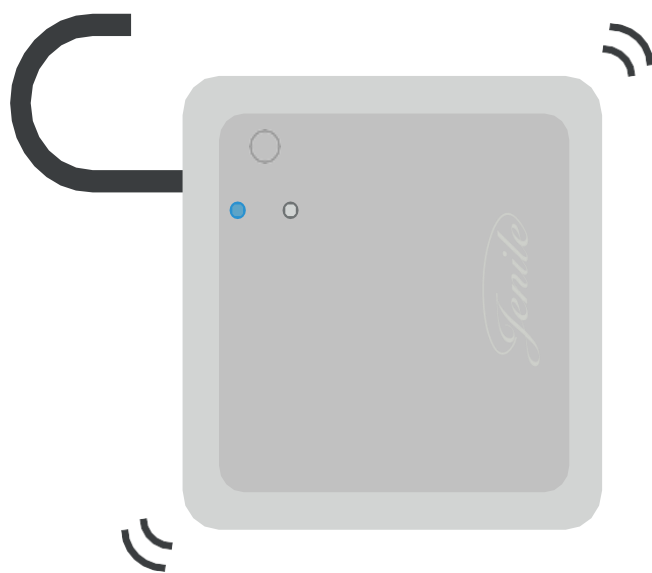




Kõik tooted on omavahel  
ühendatud.

# Sisukord :

4 : Vibrapadi CoV15

# Vibrapadi CoV15

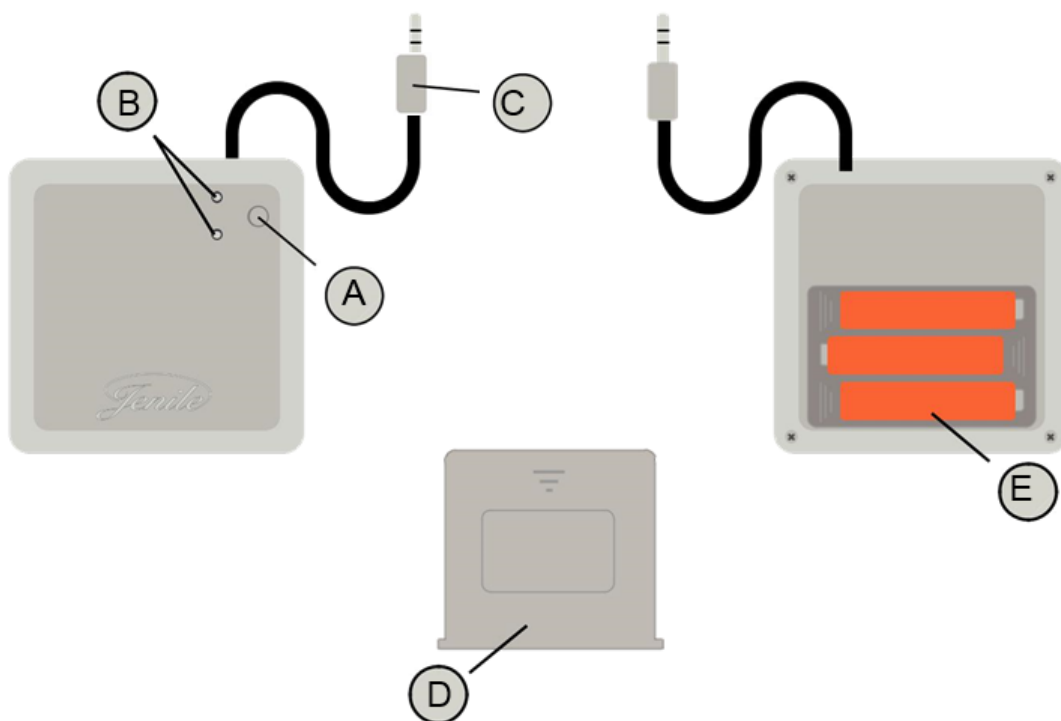

- (A) Test nupp
- (B) Töötav Led tuli

- (C) Audiokaabel
- (D) Patarei kate
- (E) AAA patarei

## Tehnilised andmed

Mõõtmed : 53 x 34 x 20 mm

Kaal : 158 g

Värvid : sinine / roheline


Toide : AAA patareid ( ei kuulu komplekti )

Ühenduskaabel : 1,4m ( audiokaabel )


Garantii : 2 aastat

## Funktsioon

Vibrapadi võimaldab hoiatada Teid kodus toimuva eest. Kui Vilkur Kuubik või Vilkurseade süttivad, edastavad nad signaali padjale, mis hakkab vibreerima.

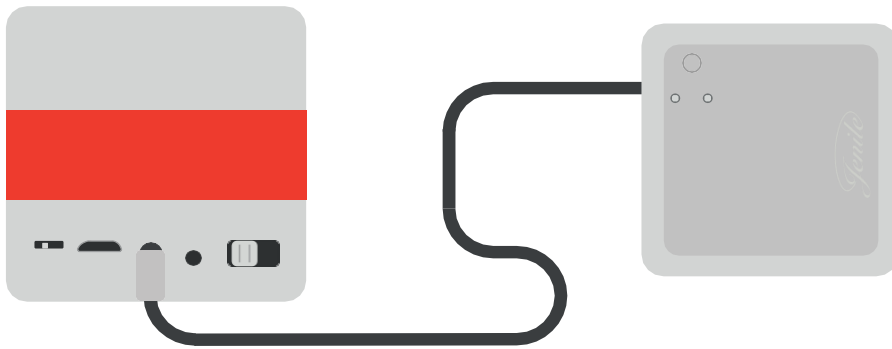

või

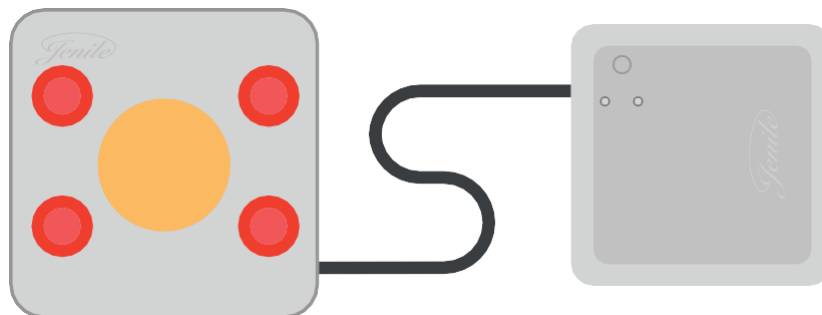

Kui te ärkate, on Teil võimalik näha häire päritolu tänu helendava värvide süsteemile.

Punane: Hädaolukorrad




Sinine: Kõned




Roheline: Kellad



Valge: üksik isendi olemasolu

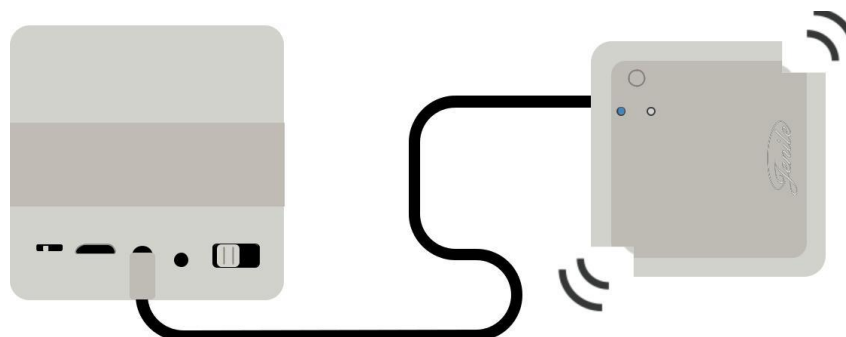

Punane: Häireolukorrad

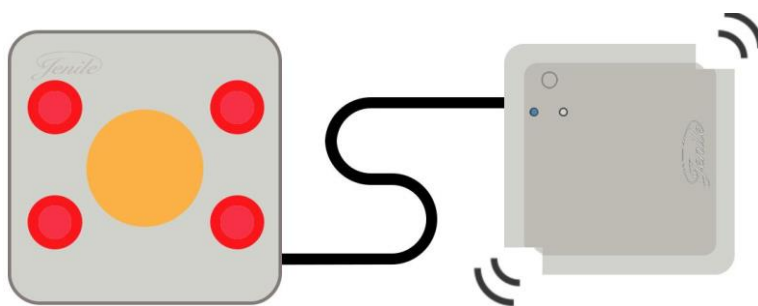

Roheline: Kellad



Sinine: Kõned




Neutraalne: üksikisendi olemasolu



## Sätted

Peale Vibrapadja ühendamist Vilkur Kuubikuga või Vilkurseadmega vibreerib padi iga kord, kui Jenile vastuvõtja saab signaali saatjatelt. Juhul kui Te ei soovi, et mõni saatja teavitaks Teid, peate eemaldama soovimatu saatja vastuvõtjast. Juhiste saamiseks, lugege palun vastava vastuvõtja kasutusjuhendit.

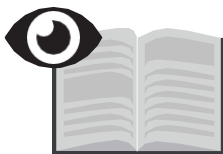



1) Vajutage vibrapadjal test-nuppu.

Kui padi vibreerib ja üleval nurgas põleb sinine LED tuli annab see märku, et padi on töökorras ning seda saab ühendada Jenile vastuvõtjaga.

Kui padi vibreerib ja märkate korraga põlemas sinist tuld padja ülaosas ja vibreerivat punast tuld padja allosas, siis peaksite patareisid vahetama.


Kui padi üldse ei vibreeri, siis on patareisid tühjaks saanud ja peaksite need koheselt välja vahetama.

2) Seejärel ühendage Vibrapadi enda vastuvõtjaga. Vajutage saatjale, mis on ühendatud Vilkur Kuubiku või Vilkurseadmega.

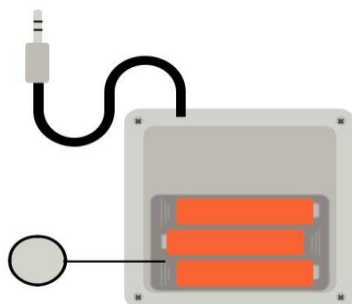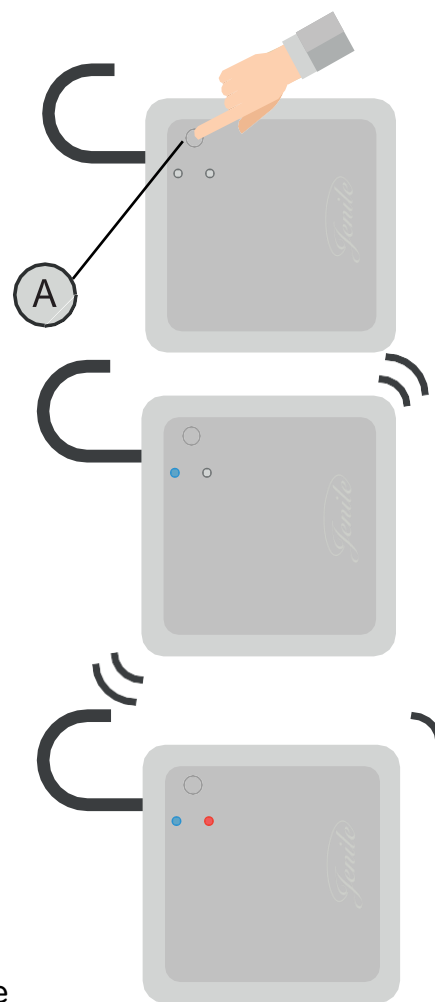





a) Vastuvõtja lülitub välja ja Vibrapadi hakkab vibreerima. See tähendab, et padi on töökorras.

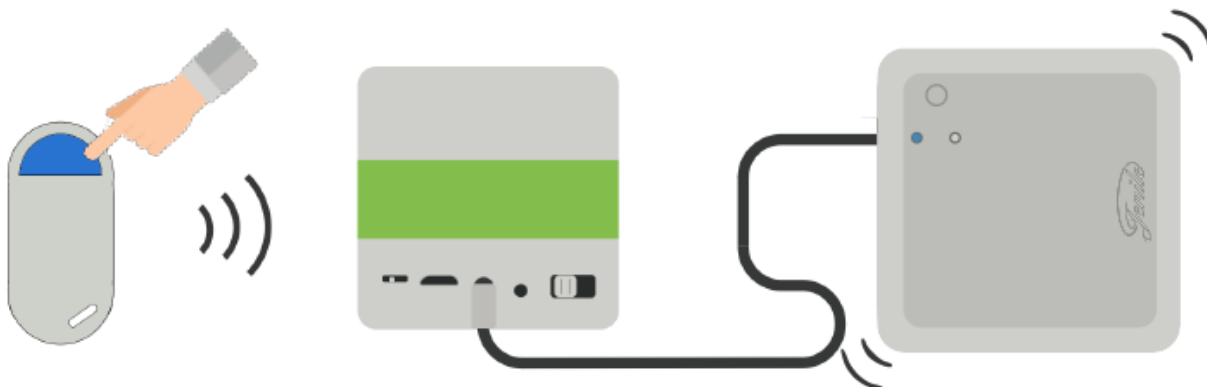


b) Märkate, et padi ei vibreeri samal ajal kui vastuvõtja on aktiveeritud. Vajutage vibrapadjal test nuppu.

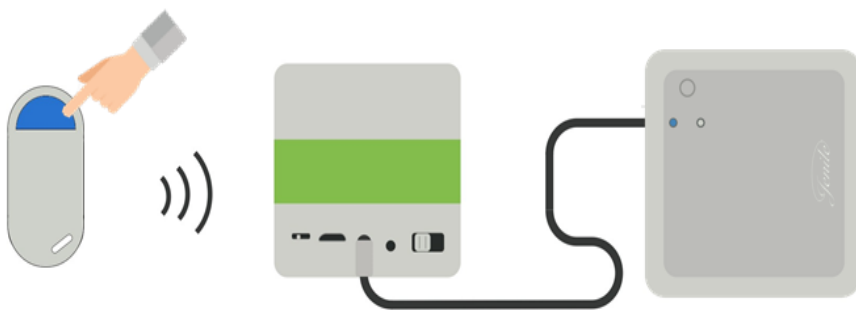

- Kui padi ei vibreeri ja ükski tuli ei põle, siis on patareid ammendunud.
- Kui vibrapadi vibreerib, siis ei saa ta vastuvõtjalt signaali kätte.

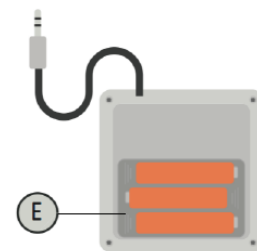

c) Kui Te märkate, et vastuvõtja ei lülitu sisse. Siis on saatja ja vastuvõtja vaheline ühendus kadunud.

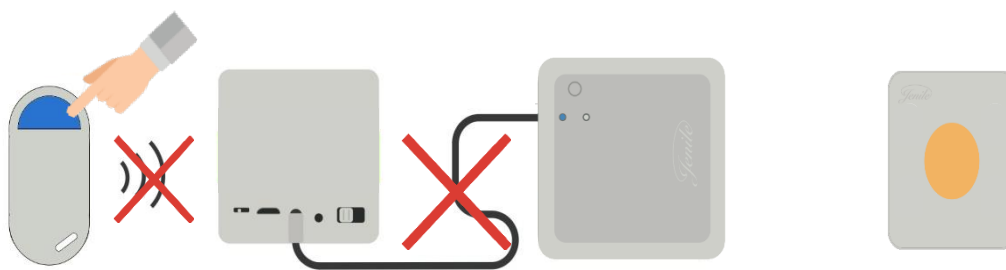

Selle taas aktiveerimiseks palun lugege vastuvõtja kasutusjuhendit.



## **Säilitamine ja hooldus**

Vibrapadi ei vaja erilist hooldamist. Kui padi on määrdunud, siis puhastage pinda pehme ebemevaba lapiga. Ärge kasutage hoolduse käigus puhastusvahendeid ega lahusteid!





[www.jenile.com](http://www.jenile.com)



Maaletooja: Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, [info@terviseabi.ee](mailto:info@terviseabi.ee), [www.terviseabi.ee](http://www.terviseabi.ee)