




Vilkur kuubik CBM19

Kasutusjuhend

Spetsiaalselt mõeldud kurtidele ja kuulmispuudega inimestele.

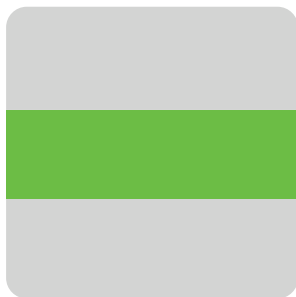




Kõik tooted on
omavahel ühendatud.


Sisukord :

- 4 :** Pakendi sisu
- 5-10 :** Vilkur kuubik CBM19

Pakendi sisu

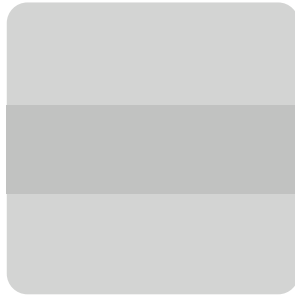

(A)

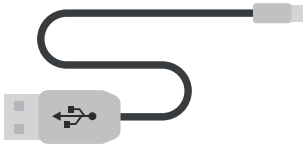


(B)



(C)

- (A) - Vilkur kuubik
- (B) - USB ühenduspesa
- (C) - Kasutusjuhend

Vilkur kuubik CBM19

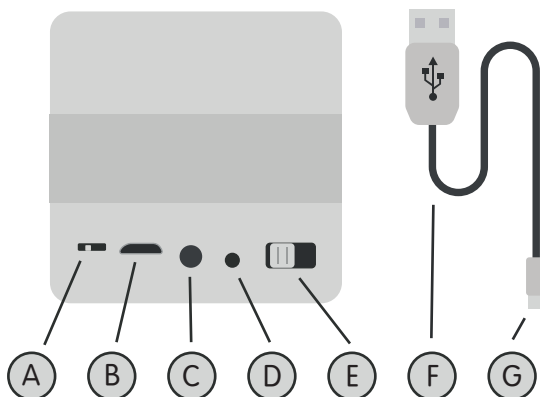

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (A) - Valguse kestus 30 / 60 / 90 sekundit | (E) - Valgus / Väljas / Valgus + Heli |
| (B) - Micro USB laadimispesa | (F) - USB ühenduspesa |
| (C) - Vibraseadme ühenduspesa | (G) - Micro USB ühenduspesa |
| (D) - Ühenduspistik | |

Tehnilised andmed

Juhtmevaba

Laetav aku

Kaal: 171,5g

Kaugus: 200 meetrit maksimaalselt vabas ruumis

Ühendatud toodete arv: maksimaalselt 20 seadet.

Toiteallikas: 3,7V 2200mAh Liitium aku

Laadimispinge peab olema piiratud kuni 4,2V

Ooterežiim: <4.5 mA

Töörežiim: <800 mA

Raadio sagedus: 433Mhz

Dekodeerimise vorming: MCU

Mõõtmed: 9.2x8.8x 4.3cm


Aku autonoomia: ühe laadimiskorraga 1 kuu (sõltuvalt kasutamisest),
2-aastane garantii (aku 1 aasta)

Kasutamine


Ükskell edastab signaali Vilkur Kuubikule, et teid teavitada. Vilkur kuubikul on laetav aku. Seadmetel all paremas nurgas asuv LED tuli näitab aku laetuse olekut:



Punane LED tuli: tähistab madalat aku taset, kuubik vajab laadimist

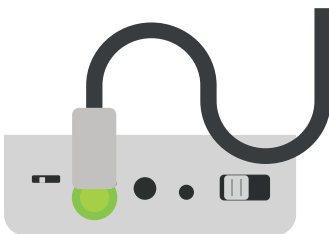

Roheline LED tuli: Aku laeb.

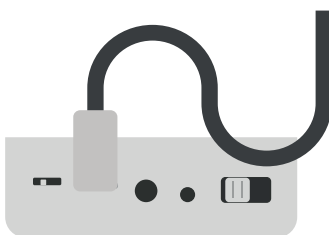


Ükski LED tuli ei põle: Aku on täis laetud.

Hoiatus: Juhul kui ükski LED tuli ei põle, võib see olla ka märk sellest, et aku on täiesti tühi.

Test


Kuubikut on lihtne testida. Juhul kui kuubik ei tööta vastavalt alltoodud juhistele soovitage teil ühendust võtta edasimüüjaga. Kuubiku testimiseks vajutage oma uksekella.

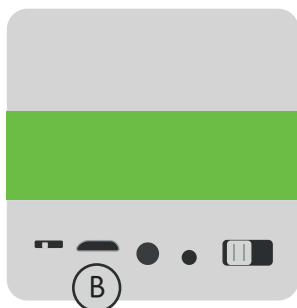

Kui kuubik ei sütti, veenduge, et aku ei ole tühjaks saanud. Saate seda kontrollida asetades oma kuubik laadima:

Sisestage kaabel F-ühenduspesa USB-toele


Sisestage G-kaabel oma seadme B ühenduspistikusse

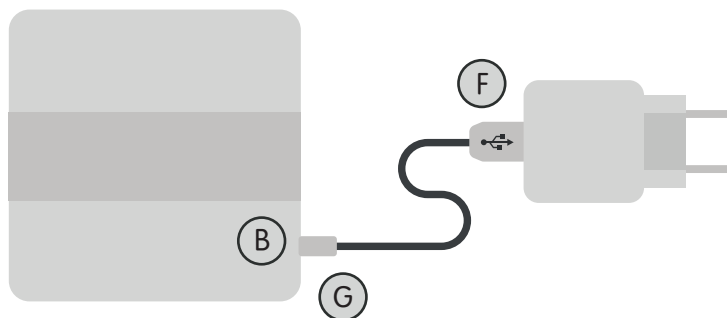


Kui seadme all paremas nurgas LED tuli ei sütti, annab see märku, et aku on täielikult laetud.

Seadistused

Kui soovite komplekti täiendada teise Jenile saatjaga, siis jälgige seadistusi seadmete omavaheliseks ühendamiseks.

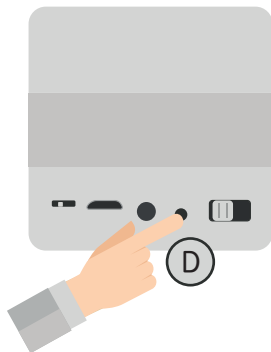


1. Vajutage kuubikul ühenduspistiku nuppu (D).

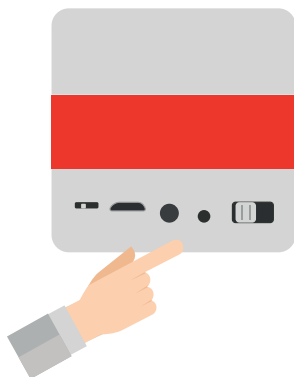

2. Vabastage ühenduspistiku nupp kohe kui kuubik süttib punaselt.

(HOIATUS: Teil on oht kustutada kõik eelmised ühendused, juhul kui hoiate nuppu all peale punase tule süttimist.)

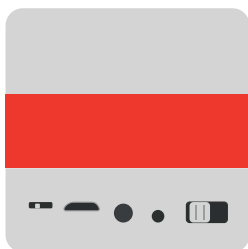


3. Samal ajal kui punane tuli põleb käivitage kohe üks oma saatjatest(helistage uksekella, vajutage kutsunginupule, hüüdke beebimonitori sisse,..) või viidake oma saatja kasutusjuhendile.



3 võimalust :

- 1. Teie Vilkur Kuubik vilgub kõikides värvides korraga: ühendus on edukas. Võite kasutada kõiki oma Jenile tooteid.
- 2. Teie Vilkur Kuubik ei vilgu: ühendus ebaõnnestus, proovige uuesti eespool olevate juhiste järgi.
- 3. Teie Kuubik vilgub 2 korda punaselt, see ei vilgu kui vajutate nupule. Ühendus on ebaõnnestunud, sest olete liiga kaua vajutanud ühenduspistiku nuppu. Te kustutasite seadme mälu ja peate uuesti kõik ühendused taaskäivitama.

Nupp (A) võimaldab Teil valida kuubiku valguse(vilgutuse) kestvust: 30 sekundit, 1 minut või 1 minut 30 sekundit.

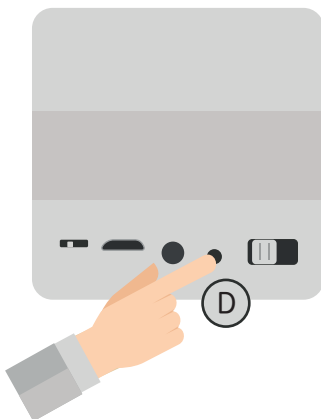


Vajutage nuppu D, et peatada vilgutused.

Häired ja värvid

Vilkur Kuubikut on võimalik kasutada kõikide Jenile saatjatega.


Häirete puhul vilgub kuubiku ülemine osa kõikides värvides. Kuubiku põhja osas olev

värv tähistab häire tüüpi. Uksekella jaoks süttib Vilkur Kuubikul roheline tuli.

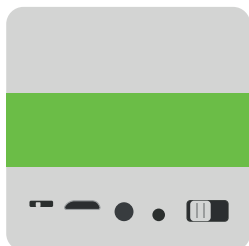


Roheline: Kellad

Uksekellad
Videokõned
Video sisend
Akustiline saatja
Kutsunginupp,...

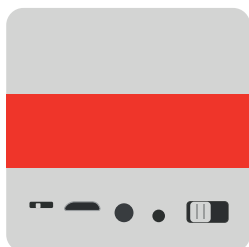


Punane: Hädaolukord

Suitsuandur
Gaasiandur
Põrandaandur,...

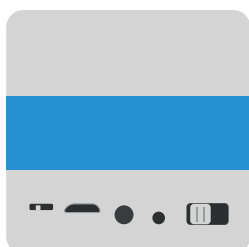

Sinine: Kõned

Tekstisõnumid
Veebikõne (Skype, oovoo...)
Telefon, faks, ...
Beebimonito

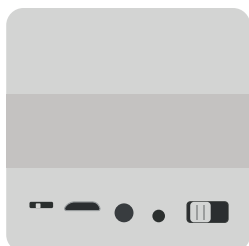

Värvitu: Kohaloleku hoiatused

Magnetlüliti uksele/aknale
Liikumisandur



www.jenile.com

