

Juhised Otiomi stardikomplekti kasutamiseks

1 Seadista Otiomi häirenupp

1. Veendu, et sul on uus Otiomi stardikomplekt.
2. Laadi alla ja logi sisse Otiomi rakendusse.
 - Sinu sisselogimisinfo saadeti e-posti teel.
3. Järgi Otiomi rakenduse paigaldusjuhiseid.

Leiad meie paigaldusjuhendi siit:
www.otiom.com/install

Tähelepanu!

Otiom on kasutusvalmis, kui oled saanud tekstisõnumi, mis teavitab sind, et see on aktiveeritud ja valmis kasutamiseks.

2 Sätted


1. Veendu, et Otiomi kodubaas asub valitud testalal/kontoris.
2. Testimiseks kasuta turvataset 6.

Leiad meie paigaldusjuhendi siit:
www.otiom.com/install

Kontrolli, et sinu nutitefonil on **sisse lüüritatud Bluetooth** ja **asukoht** ning et sul on olemas internetiühendus.


3 Test

1. Riputa Otiomi nupp **kaela** ja mine jalutama (minimaalne jalutuskäik 10 minutit, et saada hea kogemus).
2. Kui lahkud oma **kodubaasi** ulatusest, saad häire.
3. 5 minuti möödudes peaksid nägema rakenduses oma asukohta.
4. Kojujõudes tühistab seade alarmi automaatselt.

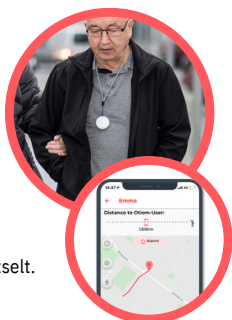

4 Lisad

1. Leia häirenupp siseruumides
 - Kasuta kaardi ülaoas olevat funktsiooni "kaugus Otiomi kasutajani".
 - See funktsioon on alati aktiivne.
2. Turvatsoon
 - Pärast turvataseme 6 testimist võid proovida testida turvataset 3, 4 või 5.
 - Ära unusta lisada oma isiklikku turvapiirkonda Otiomi rakenduses.

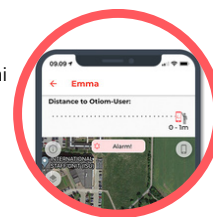

Kui vajad abi, võta meiega ühendust: • info@terviseabi.ee • **+372 6737811**